

BD125X/2



Indicatore chimico

Pacchetto di prova Bowie Dick



Utilizzo

Il pacchetto di prova Bowie-Dick rileva l'inadeguata rimozione dell'aria e la penetrazione del vapore nelle sterilizzatrici a vapore.

Cicli di 16,9 minuti a 121°C, 4 minuti a 132°C e 3,5 minuti a 134°C.

AVVERTENZE: Seguire le condizioni d'uso indicate sull'etichetta.

Normativa applicabile

Progettato secondo gli standard del sistema di gestione della qualità

ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016

ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007.

Caratteristiche


Indicatore chimico di tipo 2.

Colore iniziale: **giallo**.

Colore finale: **testa di moro/nero** (dovrebbe cambiare in modo omogeneo in tutto il foglio).

Dimensioni: 16 mm x 125 mm x 125 mm (approssimativo).

Struttura: barriere permeabili - 1 carta siliconata - 1 foglio di prova - barriere permeabili. Avvolto con carta crespata.

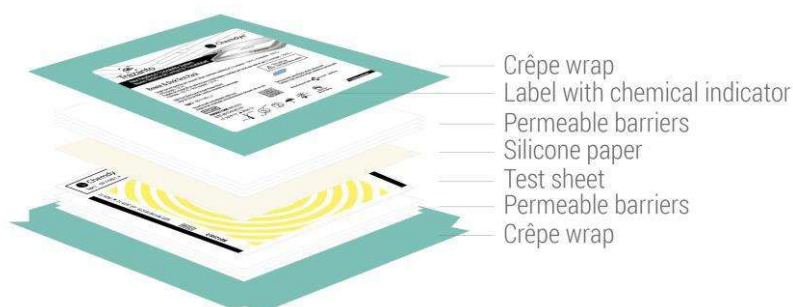

NOTA: i problemi relativi alla rimozione dell'aria o alla qualità del vapore verranno visualizzati come cambiamento di colore eterogeneo in marrone scuro/nero sul foglio di prova, con aree più chiare al centro o un cambiamento di colore non uniforme.

100% senza Pb



Per interpretare visivamente i risultati, utilizzare la guida di riferimento che si trovano nelle Indicazioni per l'uso.

Opzionalmente, la lettura dell'indicatore chimico può essere fatta utilizzando il Controllo Qualità Automatico e il Sistema di Tracciabilità di Trazanto.

(vedere le istruzioni per l'uso nel manuale del dispositivo).

Condizioni ambientali durante la produzione

T= 15-30 °C, UR= 30-80 %.

Condizioni di stoccaggio

T= 10-30 °C, UR= 30-80 %, tenere al riparo dalla luce diretta.

Condizioni di trasporto

Le condizioni di conservazione devono essere rigorosamente seguite.

Trasporto in scatole chiuse e rinforzate per evitare danneggiamenti.

Il trasporto di questo prodotto non rappresenta un rischio per la salute.

Data di scadenza

5 anni.

Imballaggio

20 unità per scatola.

Informazioni sull'imballaggio: descrizione del prodotto, processo per l'uso previsto, classificazione secondo il regolamento, condizioni di conservazione, informazioni sul produttore e dati sull'etichetta dell'imballaggio.

Etichettatura

Sulla confezione del prodotto: la riga dell'indicatore chimico (tipo 1), stampata con inchiostro reattivo al vapore, vira dal blu (non esposto) al grigio scuro/nero (esposto). Codice e descrizione del prodotto, destinazione d'uso, procedimento per la destinazione d'uso, classificazione secondo normativa, condizioni di conservazione, numero di lotto, data di scadenza, data di fabbricazione e codice datamatrix. Sull'imballaggio del prodotto: codice prodotto e descrizione, processo per l'uso previsto, cambio colore, presentazione, numero di lotto, data di scadenza e di produzione, codice a barre e codice datamatrix.

Possibili mercati target

Industrie Sanitarie, Alimentari, Farmaceutiche e Mediche.

Altre informazioni importanti

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso del prodotto prima dell'uso.

Precauzioni

Non conservare il prodotto vicino ad agenti sterilizzanti.

Non esporre questo prodotto a EO, calore secco o qualsiasi processo di sterilizzazione diverso dal vapore.

Non utilizzare un Bowie-Dick Test Pack nei cicli di sterilizzazione a vapore a gravità (dove non è presente una fase di pre-vuoto da controllare) o qualsiasi tipo di processo di sterilizzazione diverso dal vuoto assistito.

Non riutilizzare lo sterilizzatore fino a quando l'indicatore chimico non è cambiato in modo omogeneo nel colore indicato nel prodotto.