



CATALOGO ENDODONZIA 20**26**

RIFINITURA DELLA CAVITÀ DI ACCESSO



Punte ultrasoniche A-C Tips

Punte ultrasoniche A-C Tips per la rifinitura della Cavità di Accesso

Le punte ultrasoniche da endodonzia per la rifinitura della Cavità di Accesso, sviluppate dal Prof. Arnaldo Castellucci, in collaborazione con Woodpecker, rappresentano una soluzione avanzata per l'odontoiatria moderna, focalizzata sulla **mini-invasività** e sulla massima precisione durante l'apertura e la rifinitura della camera pulpare.



Impiego Clinico

Le AC Tips sono inserite nel protocollo endodontico per specifiche fasi critiche. I 5 inserti, ognuno con la sua specifica applicazione clinica, sono stati sviluppati per eseguire una corretta cavità di accesso in continuità con le pareti della camera pulpare senza alterazioni del pavimento.

L'uso degli ultrasuoni permette un controllo millimetrico del taglio, riducendo lo stress clinico e il rischio per il paziente.

Rifinitura delle Pareti:

vengono utilizzate per regolarizzare le pareti della cavità d'accesso, eliminando i sottosquadri di dentina e permettendo allo strumento endodontico di entrare nel canale con un accesso rettilineo.

Localizzazione degli Orifizi (MB2):

Sono fondamentali per rimuovere le interferenze corno-dentinali e i ponti di dentina calcificata che spesso nascondono l'imbocco dei canali secondari, come il canale mesio-palatino (MB2) nei molari superiori.

Preparazione Mini-Invasiva:

consentono di conservare quanta più struttura dentale sana possibile.

Sicurezza operativa:

Possono essere utilizzate in prossimità del pavimento pulpare senza il timore di creare gradini o false strade, grazie proprio alla loro punta non attiva.








Le **punte ultrasoniche A-C Tips** permettono la **creazione di un accesso perfetto e sicuro**, minimizzando gli errori procedurali in una delle fasi più delicate del trattamento endodontico.



Vantaggi

- Ideali sia per dentisti generici che per Specialisti in Endodonzia;
- Parte lavorante con micro-lame ad alta precisione per un controllo ottimale del taglio;
- Tutte le punte presentano un angolo di 110° tra l'attacco del manipolo e la parte lavorante per un controllo visivo ottimale;
- Realizzate in lega di acciaio senza rivestimento in diamante per una maggiore resistenza all'usura;
- Dotate di water port integrato per un'irrigazione e un raffreddamento efficaci durante l'utilizzo;
- Compatibili con sistemi EMS e SATELEC;

UNA PUNTA, UNA APPLICAZIONE

	Inserto EMS	Inserto SATELEC	Applicazione	Forma	% della potenza massima erogabile dalle sorgenti ultrasoniche Endodontiche
	E51	ED51	Rifinitura delle pareti della cavità di accesso	Troncoconica (Ø 0.8–1.6 mm, lunghezza 12 mm, punta non attiva)	80-90%
	E52	ED52	Reperimento del canale mesio-palatino (MB2)	Troncoconica (Ø 1.0–1.54 mm, lunghezza 8 mm, punta attiva)	80-90%
	E53	ED53	Rimozione di calcificazioni canalari e di perni in fibra	Punta acuminata (Ø 0.9mm, lunghezza 8 mm, Estremamente affilata e sottile)	60-70%
	E54	ED54	Rimozione di perni metallici	Ovale senza lame (a forma romboidale, tipo "pallone da rugby", con lati piatti)	90-100%
	E55	ED55	Rifinitura del pavimento della camera pulpare	Forma cilindrica concava (Ø 1 mm, lunghezza 10 mm, estremità attiva della punta concava con micro-piramidi)	70-80%


SAGOMATURA



ZARC

BlueShaper PRO

Due trattamenti termici in un unico strumento

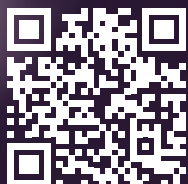

DualWire®



Progettato per una endodonzia all'avanguardia

BlueShaper PRO® è stato specificamente progettato per soddisfare le esigenze degli endodontisti, fornendo uno strumento di ultima generazione e all'avanguardia.

Resistenza e prestazioni eccezionali

È stato realizzato con materiali di alta qualità e sottoposto a **rigorosi standard di produzione**.

Offre prestazioni eccezionali grazie a:

- Maggiore **facilità nella penetrazione** dei canali;
- Aumento della **resistenza allo stress torsionale**;
- **Efficienza di taglio** mantenendo lo standard BlueShaper® nella resistenza alla fatica ciclica.

BlueShaper PRO

Migliora la qualità del trattamento endodontico

La tecnologia **DualWire®**, sviluppata da Zarc, permette una **maggiore versatilità** dello strumento, offrendo una **punta tagliente** che mantiene la stessa flessibilità dello strumento BlueShaper®.

BlueShaper PRO

L'efficienza della nuova lega

Grazie al **doppio trattamento termico** di **BlueShaper PRO®**, la preparazione del canale è più precisa ed efficace.

Ha una punta tagliente potenziata dai 3 mm Gold della punta.



DualWire®

Tecnologia DualWire®

Primo sistema endodontico che incorpora 2 trattamenti termici in un unico strumento brevettato da Zarc4Endo.

BlueShaper PRO

La famiglia BlueShaper PRO® è composta da 8 strumenti, il Professionista può scegliere la sequenza più adatta a ciascun caso clinico:

Sequenza base:

Z1, Z2, Z3 e Z4

Sequenza completa:

ZXS, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5

Disponibili anche in blister dedicati:

ZXS, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 e Z7



Punta
tagliente



Grande
resistenza
torsionale











Resistenza alla
fatica ciclica



Massima
flessibilità

CONICITÀ

Ø

ZXS		8-2%	0,19
Z1		10-2%	0,14
Z2		10-2%	0,17
Z3		5-6%	0,19
Z4		5-6%	0,25
Z5		5-6%	0,30
Z6		4-5%	0,40
Z7		4-5%	0,50

IMPOSTAZIONI MOTORE ENDODONTICO

Velocità suggerita: **500 RPM** - Torque: **4**

SlimShaper PRO

L'EQUILIBRIO PERFETTO
PER L'ENDODONZIA
MINIMAMENTE INVASIVA



DualWire®

Con l'esclusiva tecnologia
DualWire®, brevettata da Zarc,
per una maggiore efficienza,
resistenza e flessibilità dello strumento.

Il miglior strumento per le anatomie complesse

SlimShaper PRO® è stato progettato specificamente per soddisfare le esigenze dei professionisti dell'endodonzia che lavorano con **anatomie complesse**, fornendo uno strumento innovativo che rappresenta l'avanguardia dell'**endodonzia minimamente invasiva**.



Dr. José Aranguren

Sistema minimamente invasivo con tecnologia DualWire®: capacità di taglio e flessibilità combinate in preparazioni altamente conservative.




Dr. Massimo Giovarruscio

SlimShaper PRO®, grazie alla tecnologia DualWire®, garantisce un'eccezionale flessibilità ed efficacia di taglio, mantenendo il trattamento endodontico minimamente invasivo, soprattutto con piccole anatomie multiple e complesse.



Professor Shanon Patel

SlimShaper PRO® cambia le regole del gioco. La tecnologia DualWire® rende la sagomatura facile e predicibile.

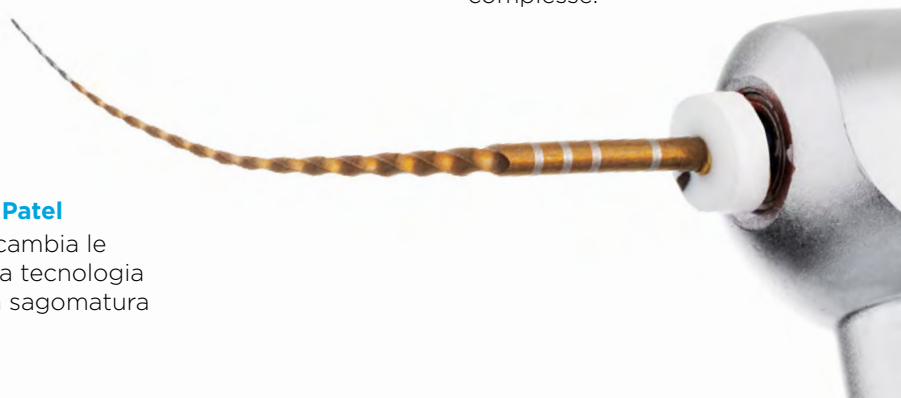

La tecnologia DualWire® è stata sviluppata da Zarc per ottenere il perfetto equilibrio tra efficacia, resistenza torsionale e flessibilità in ogni strumento SlimShaper PRO®.

SlimShaper PRO

L'equilibrio perfetto



SlimShaper PRO® è il secondo sistema della famiglia PRO che ha rivoluzionato l'endodonzia grazie alla tecnologia **DualWire®**. Ora è più **flessibile, resistente ed efficace** che mai.

È dotato di una **punta più affilata**, grazie al doppio trattamento termico negli ultimi 3 mm, che offre **una maggiore efficienza di taglio, penetrazione del canale, e resistenza allo stress torsionale**. Ciò riduce il rischio di fratture o deformazioni.



DualWire®

Tecnologia DualWire®

La famiglia PRO di Zarc utilizza la tecnologia DualWire® per fornire agli strumenti il perfetto equilibrio tra efficacia, resistenza e flessibilità.

Il sistema minimamente invasivo

SlimShaper PRO® è un sistema di strumentazione con una flessibilità senza precedenti. La sua conicità del 3-4% lo rende ancora più conservativo, versatile e sicuro.

SlimShaper PRO

SILVER + GOLD

Massima capacità di taglio, penetrazione del canale, e resistenza torsionale.

GOLD + PINK

L'equilibrio perfetto tra capacità di taglio e flessibilità.

GOLD + BLUE

Straordinaria flessibilità e una maggiore resistenza alla fatica ciclica.



SlimShaper PRO® conserva il doppio della dentina rispetto ad un sistema di strumentazione canalare tradizionale.

Karim Aazzouzi-Raïss; Ana Ramírez-Muñoz; Pedro M. Mendez; Gaya C. S. Vieira; José Aranguren; Alejandro R. Pérez. J Endod . 2023 Apr;49(4):430-43.



Minimamente invasivo



Massima capacità di taglio



Resistenza torsionale



Flessibilità e memoria di forma



Versatilità

Massima flessibilità

SlimShaper PRO® è composto da 3 strumenti, tutti caratterizzati da tecnologia DualWire®.

Specificamente progettato per anatomie complesse

(strette, larghe, e/o con doppia curvatura) **o molto complesse.**

ZS1



CONICITÀ

6-2%

Ø

15

ZS2



3-4%

20

ZS3



3-4%

25

IMPOSTAZIONI MOTORE ENDODONTICO

Velocità suggerita: **500 RPM** - Torque: **3**

ZARC

Excalibur PRO

NUOVO PASSO VERSO
IL FUTURO GRAZIE
ALLA TECNOLOGIA
NANOCOATING

FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA DI
TAGLIO IN UN SOLO FILE



GUARDA IL VIDEO



Excalibur PRO

Tecnologia all'avanguardia ad ogni rotazione

Excalibur PRO è un file reciprocante molto bilanciato con caratteristiche che lo rendono unico:

- la **tecnologia nanocoating** applicata alla superficie conferisce allo strumento durezza e resistenza. Questo permette di ridurre la **fatica ciclica** e il **rischio di frattura**, senza compromettere la **flessibilità** e il **controllo della memoria di forma**.
- **nuova punta ad alta precisione**. Grazie alla nuova e più efficiente geometria della punta, Excalibur PRO **massimizza la capacità di taglio e migliora la penetrazione**, assicurando una performance eccezionale per ogni tipo di utilizzo.
- **conicità del 5%**. Un **design altamente conservativo** che permette di rimuovere meno dentina, preservando l'anatomia originale del dente e assicurando risultati più precisi e meno invasivi.







Il file reciprocante più avanzato per i professionisti più esigenti



Excalibur PRO è disponibile in 4 diversi diametri, permettendo allo specialista di scegliere il più appropriato a seconda delle necessità cliniche: 20/05, 25/05, 35/05 e 45/05

Excalibur PRO

Caratteristiche tecniche


		CONICITÀ	Ø
E20 SMALL		5%	0,20
E25 REGULAR		5%	0,25
E35 MEDIUM		5%	0,35
E45 LARGE		5%	0,45



Movimento reciprocante: **30° in senso orario e 150° in senso antiorario**

Velocità suggerita: **400-500* RPM** - Torque: **4**

(*performance ottimale a 500 RPM)

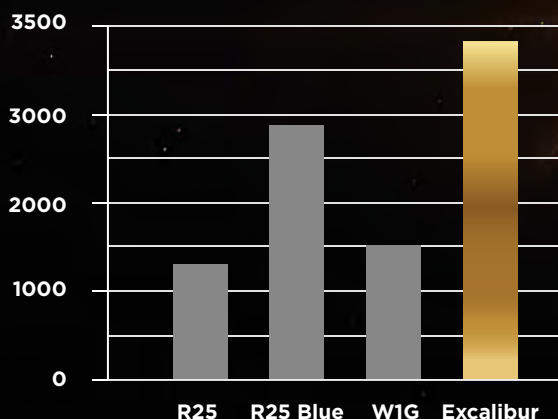

NCF (Numero di cicli alla frattura)

*José Aranguren, Felipe Oliveros-Porras, Ana Ramírez-Muñoz, Irene Pérez, Marcela Salamanca-Ramos, Karim Aazzouzi-Raiss & Alejandro R. Pérez (2024). Study: **Comparative Analysis of NiTi Instruments with Different Alloy Treatment**. Materials 2024, 17, 4817. <https://doi.org/10.3390/ma17194817>

Studi Scientifici

Studi scientifici considerano **Excalibur®** uno dei file più resistenti alla fatica ciclica sul mercato.

La sua resistenza **supera del 32%** ogni altra sistemica testata.



ApicalShaper

ApicalShaper® è compatibile con tutti i sistemi di sagomatura canalare presenti sul mercato, oltre a:

- ✓ **BlueShaper PRO**
- ✓ **Excalibur PRO**
- ✓ **SlimShaper PRO**



Strumento per la sagomatura apicale con solo il 3% di conicità per preservare meglio la dentina pericervicale.



MASSIMA FLESSIBILITÀ



MAGGIORE CAPACITÀ DI TAGLIO




4 POSSIBILI STRUMENTI PER LA SAGOMATURA APICALE: 30, 35, 40 E 50



MASSIMA SICUREZZA




ApicalShaper

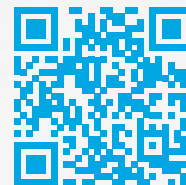

José Aranguren

ApicalShaper® permette una migliore pulizia e sagomatura a livello apicale preservando la dentina pericervicale. È possibile fare una sagomatura conservativa garantendo una migliore detersione del canale.

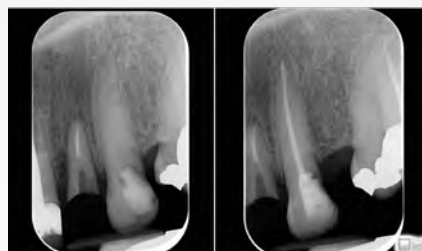

Stéphane Simon

ApicalShaper® è molto utile e semplice da utilizzare soprattutto in casi di sagomature con ampi foramen apicali. La sua flessibilità è incredibile.



Valter Fernandes

Quello che apprezzo di più di questo sistema è la possibilità di essere conservativi senza compromettere la dentina nell'area pericervicale garantendo la corretta detersione apicale.



ApicalShaper

La gamma ApicalShaper® è composta da quattro strumenti che permettono allo specialista di scegliere quello che si adatta meglio alle sue esigenze cliniche.

30/03, 35/03, 40/03 e 50/03

**IMPOSTAZIONI MOTORE
ENDODONTICO:
400-500 RPM, TORQUE 4**

	CONICITÀ	Ø
30	3%	0,30
35	3%	0,35
40	3%	0,40
50	3%	0,50

Creazione del Glide Path



Gli strumenti rotanti NiTi hanno rivoluzionato l'endodonzia, permettendo anche all'operatore meno esperto di realizzare sagomature perfettamente tronco-coniche in armonia con l'anatomia originaria e migliorando notevolmente la prognosi anche di casi più complessi.

I nuovi strumenti rotanti sviluppati da Zarc sono stati realizzati per creare rapidamente e in assoluta sicurezza il Glide Path, eliminando così l'ultima fase manuale in cui il Dentista può commettere errori e dando all'Endodontista esperto un'arma per trasformare casi difficili in casi estremamente semplici.

Z-Glider EVO

Cod. ZAZGE00021-25-31



Z-Glider EVO® è studiato per facilitare la creazione del glide-path, riducendo lo stress clinico e preservando l'anatomia del canale. Lega Gold di seconda generazione che garantisce efficienza di taglio, flessibilità e controllo della memoria di forma.

Fornisce una resistenza alla torsione sufficiente per avanzare attraverso qualsiasi canale. **Il movimento Z-Glider EVO® è a rotazione continua.**

Favorisce la strumentazione: la realizzazione di un glide path favorisce la strumentazione fino alla lunghezza di lavoro.

Confezionamento: Disponibile in blister da 3 files nelle lunghezze da 21-25-31 mm



Excalibur Glider PRO


Cod. ZAZGE21PRO2, ZAZGE25PRO2, ZAZGE31PRO2

Progettato per garantire un **glide path** efficiente e sicuro, grazie all'elevata efficienza di taglio, rischio ridotto di frattura e resistenza ottimizzata alla fatica ciclica.

La **tecnologia Nanocoating** applicata alla sua superficie offre maggiore **durezza e resistenza** all'usura senza compromettere la flessibilità del nucleo e il controllo della memoria di forma dello strumento, garantendo prestazioni più durature e affidabili.


Con il suo **movimento alternato** Excalibur Glider PRO diventa l'alleato perfetto per una preparazione precisa e controllata prima della strumentazione principale. Cerchi la combinazione ideale? Abbinalo alla nuova sistemata reciproca **Excalibur PRO**. Insieme, formano il tandem perfetto per i professionisti che cercano trattamenti più sicuri, prevedibili e rapidi.

Confezionamento: Disponibile in blister da 3 files nelle lunghezze da 21-25-31 mm

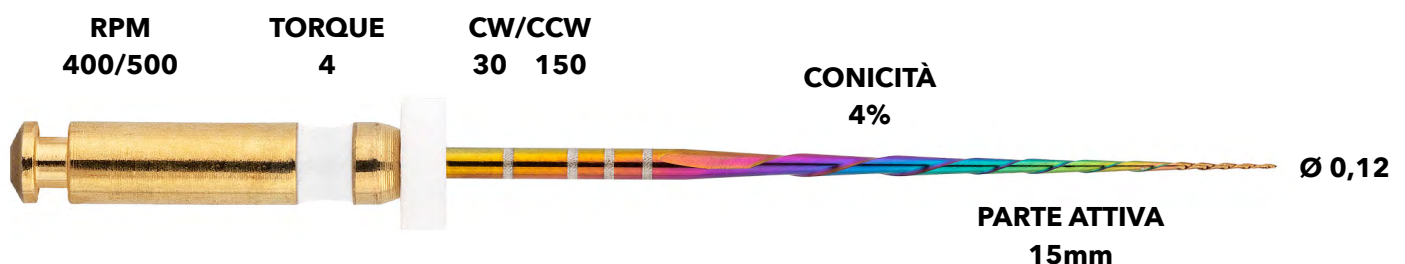

RetreatAll®

Cod. ZAZRETREATA

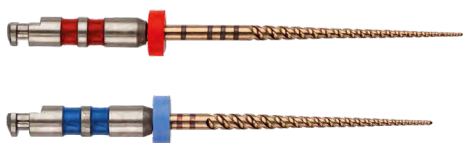

RetreatAll® sono gli strumenti per il ritrattamento del canale radicolare.

Con **solo due file** vengono garantiti ritrattamenti efficaci con l'eliminazione della guttaperca dall'interno del canale.

Si caratterizza principalmente per:

- **Sezione triangolare:** gli strumenti **RetreatAll®** hanno una sezione triangolare per eliminare efficacemente la guttaperca
- **Rotazione continua:** il movimento degli strumenti **RetreatAll®** è rotatorio continuo
- **Solamente 2 file:** sono necessari solamente due strumenti per rimuovere la guttaperca dall'interno del canale radicolare
- **Eliminazione efficace della guttaperca:** entrambi gli strumenti avanzano per la rimozione della guttaperca più coronalmente e apicalmente grazie al loro design

ZCondensor

Codici Vari (ZAZCON*)



Z-Condensor® sono gli strumenti di Zarc per la termocompattazione della guttaperca all'interno del canale radicolare.

Si caratterizza per:

- **Riempimento 3D:** gli strumenti Z-Condensor® favoriscono il riempimento tridimensionale del canale radicolare
- Prodotto in **acciaio inossidabile** disponibile nei seguenti calibri: 025, 030, 035, 040, 045
- Presenta dei segni di profondità per garantire un **controllo assoluto**

Strumentazione manuale

ZMicro-Opener

Cod. ZAUDMO1004, 1504, 2004



Z-Micro-Opener sono gli strumenti endodontici che, grazie alla **forma anatomica del manico**, permettono al dentista una **miglior visuale** del campo operatorio e di poter utilizzare i sistemi di ingrandimento e il microscopio. Aiutano il sondaggio dei canali difficili anche in presenza di calcificazioni e sono imprescindibili nei ritrattamenti per rimuovere la guttaperca e altri ostacoli dall'interno del canale radicolare. Sezione della lima Hedstroem con **bordi taglienti a spirale**.

ZMicro-Shaper

Cod. ZAUDMS2002, 2502, 3002



Z-Micro Shaper sono gli strumenti endodontici di Zarc che, grazie alla **forma anatomica del manico**, permettono al dentista una **miglior visuale** del campo operatorio e di poter utilizzare i sistemi di ingrandimento e il microscopio. Inoltre, la **sezione dello strumento** è stata appositamente disegnata per la localizzazione dei canali radicolari.

BlueShaper PRO HandFiles

Codici Vari (ZAZBSHF*)



BlueShaper PRO è il primo sistema al mondo che combina due trattamenti termici in un unico strumento, grazie alla tecnologia DualWire®.

Tutti gli strumenti della linea BlueShaper PRO hanno gli ultimi 3 mm in punta in lega Gold per migliorare la capacità di taglio.


Controllo manuale al massimo livello

Progettato per i professionisti che preferiscono trattamenti endodontici completamente manuali e per coloro che scelgono di rifinire i casi manualmente, per una calibrazione superiore e un migliore controllo tattile.

Misura disponibile 25 mm; Sequenza ZXS - Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5

KFlex

Codici Vari (ZAZK*)

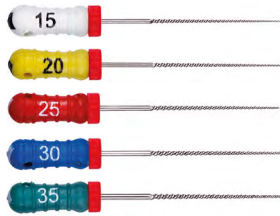

K-Flex è lo strumento manuale k-file con punta non attiva in acciaio inossidabile di Zarc.

Le sue caratteristiche principali sono:

- **Acciaio inossidabile:** i K-Flex sono stati progettati in acciaio inossidabile ad alta resistenza
- **Punta non attiva:** ideale per sondare i condotti canalari seguendo l'anatomia senza creare solchi e gradini
- Stopper in silicone di colore rosso per una **maggiore visibilità**
- **Manico in plastica SBS** ottenuto mediante un processo di polimerizzazione che gli conferisce alta resistenza
- **Pre-sterilizzato:** gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso
- **Diverse misure:** le misure disponibili vanno da ISO 06 a 45 con una conicità del 2%. La parte attiva è lunga 16mm.

HFile

Codici Vari (ZAZHEDST*)




H-File è lo strumento manuale hedstroem in acciaio inossidabile Zarc. Ideale per la rimozione di detriti organici e residui di lavorazione dopo l'utilizzo del K-File. Le sue caratteristiche principali sono:

- **Acciaio inossidabile:** gli strumenti H-File sono stati progettati in acciaio inossidabile ad alta resistenza.
- Sezione lavorante di **forma romboidale**.
- **Manico in plastica SBS** ottenuto mediante un processo di polimerizzazione che gli conferisce alta resistenza.
- **Pre-sterilizzato:** gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso.
- **Diverse misure:** le misure disponibili vanno da ISO 08 a 80 con una conicità del 2%.
- La parte attiva è lunga 16 mm.

C+File

Codici Vari (ZCFILE*)

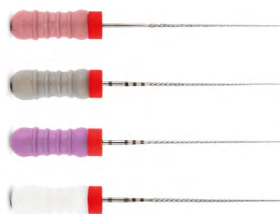


C+File è lo strumento canale manuale di Zarc utilizzato per allargare il canale radicolare con movimenti di sollevamento e reciprocità verticale:

- Prodotto in **acciaio inossidabile**.
- Si differenzia dal K-File in quanto è realizzato con uno speciale processo di trattamento, **forte in punta e flessibile sul collo**.
- È particolarmente adatto **per i denti calcificati**.
- Si tratta di uno strumento standard **con conicità del 2%**
- È uno strumento **non sterile**.
- **Diverse misure:** 21mm, 25mm e 31mm; diametri in punta 0.06 (rosa)/0.08 (grigio)/0.10 (viola)/0.15 (bianco)

KFile

Codici Vari (ZAZKF*)

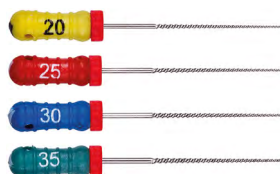

K-File è lo strumento manuale k-file in acciaio inossidabile di Zarc.

Le sue caratteristiche principali sono:

- **Acciaio inossidabile:** i K-File sono stati progettati in acciaio inossidabile ad alta resistenza
- Stopper in silicone di colore rosso per una **maggiore visibilità**
- **Manico in plastica SBS** ottenuto mediante un processo di polimerizzazione che gli conferisce alta resistenza
- **Pre-sterilizzato:** gli strumenti sono confezionati in blister sterili pronti all'uso
- **Diverse misure:** le misure disponibili vanno da ISO 06 a 45 con una conicità del 2%. La parte attiva è lunga 16mm.

Z-GAUGE RULER

Cod. ZAZGR



Z-Gauge Ruler è stato specificamente progettato per misurare con facilità e precisione il diametro delle punte di carta e di guttaperca e per calibrare la lunghezza delle parti attive degli strumenti utilizzati in endodonzia.

FILE ORGANIZER

Cod. ZAZSTANDB, DP, DY



File Organizer è un box autoclavabile con un righello di misurazione integrato per tenere in ordine gli strumenti endodontici.

Caratteristiche:

- Autoclavabile
- Righello incluso
- **Colori disponibili:** rosso, blu e giallo

YELLOW ZARC PETALS

Cod. ZAZPY



Yellow ZARC petals sono stopper in silicone a forma di fiore per un controllo ottimale della frequenza d'uso e affaticamento degli strumenti.

Caratteristiche:

- Autoclavabili
- 50 unità per sacchetto
- Colore giallo

ZClean

Cod. ZASP001025RE e ZASPONGE



ZClean è un set completo per la pulizia dei file con un design curato e pratico. È possibile sterilizzarlo in autoclave e permette una facile identificazione degli strumenti.

ZClean Sponges sono le spugnette da inserire nel box Z-Clean per pulire gli strumenti endodontici e tenerli pronti all'uso durante la pratica.

All'interno della confezione troviamo **1 Z-Clean**.

Le spugnette Z-Clean Sponges sono confezionate in **box da 50pz**

ZRinse

Cod. ZAUDIN3022050, 3026050



ZRinse sono gli aghi universali di Zarc dedicati all'irrigazione del canale radicolare.

Sono stati progettati per ottenere una disinfezione più completa durante il trattamento endodontico, grazie alla punta con doppio foro laterale d'uscita a diverse distanze.

Hanno un collo angolato per una migliore visibilità e con la connessione luer-lock possono essere utilizzati con le siringhe di qualunque marca.

Sono confezionati in **box da 50pz** e disponibili nelle **misure 22mm e 26mm**.

ZPlugger

Cod. ZAUDPL357001, 408001, 5010001, 6012001



Strumenti manuali con manico metallico anatomico. Le punte hanno due diverse leghe: **NiTi** per le misure che vanno **da 035 a 060**, mentre in **acciaio inossidabile** per quelle **da 070 a 120**. **Facilitano la compattazione della guttaperca**, infatti, il loro design li rende adatti sia al trattamento dei canali curvi che per la compattazione della guttaperca nel terzo medio e nel terzo coronale dei canali radicolari.



Kohler Dental si è affermata come azienda leader di strumenti endodontici, progettati appositamente per soddisfare le esigenze dei trattamenti moderni dei canali radicolari.

Gli strumenti non sono solo altamente funzionali, ma anche resistenti alla corrosione e progettati per garantire prestazioni durature. Tutti gli strumenti Kohler sono fabbricati in conformità con i più recenti standard DIN/ISO e sottoposti a test approfonditi per garantire la biocompatibilità, i corretti processi di pulizia, disinfezione, sterilizzazione e test di durata.

Ogni strumento è testato per garantire che rimanga affidabile per anni, soddisfacendo gli standard e i requisiti del MDR (Regolamento sui Dispositivi Medici).



Trinovo®

Il manico brevettato con ergonomia perfetta

- La superficie particolare del manico garantisce una presa sicura sia nei movimenti di trazione che di spinta;
- Migliore pulizia e sterilizzazione degli strumenti;
- Lavoro non faticoso grazie al grande diametro ma alla struttura leggera;
- Gli strumenti non rotolano;
- Disponibile sia in acciaio inox che in **Peek**.

Trinovo Peek nero

Polimero tecnico ad alte prestazioni che offre proprietà di resistenza meccanica e chimica che tollerano alte temperature, quindi autoclavabile. È rigido e non deformabile, biocompatibile ed elettricamente isolante.

È IL RIVESTIMENTO CHE CARATTERIZZA LA LINEA ENDO BLACK

ENDOBLACK®

Il rivestimento antiriflesso facilita il lavoro sotto la luce del microscopio e previene l'affaticamento visivo.

- Eccellenti proprietà chimiche
- Barriera biocompatibile
- Insensibilità ai detergenti
- Rischio di corrosione da contatto notevolmente ridotto.

Il rivestimento è DLC (Diamond-Like-Carbon), materiale a base di carbonio che possiede alcune proprietà simili a quelle del diamante.

- Elevata durezza
- Enorme resistenza all'abrasione (l'abrasione è ridotta di circa 7 volte rispetto al titanio o all'acciaio inossidabile)
- Riduzione significativa dell'usura e maggiore durata del prodotto





STRUMENTI PER LA RIMOZIONE DELLA GUTTAPERCA


Gli strumenti sono stati appositamente progettati per la revisione ortograde di un trattamento endodontico.

I micro-ganci sulle estremità fini sono prodotti con la massima precisione e assicurano un aggancio sicuro alla guttaperca, fornendo al contempo un'eccezionale resistenza alla trazione e stabilità.

Il manico in PEEK, una plastica ad alte prestazioni stabile nella forma e nel colore, è estremamente leggero: ogni strumento pesa solo 12 grammi.

Il design dell'impugnatura combina i vantaggi della semplicità di pulizia e sterilizzazione con le eccezionali caratteristiche di presa.

Gli strumenti sono disponibili in quattro versioni, adatte alle diverse situazioni cliniche: **lunghezza delle estremità di lavoro 26 mm o 18 mm, ganci a sinistra/destra ◄► o su/giù ▼**

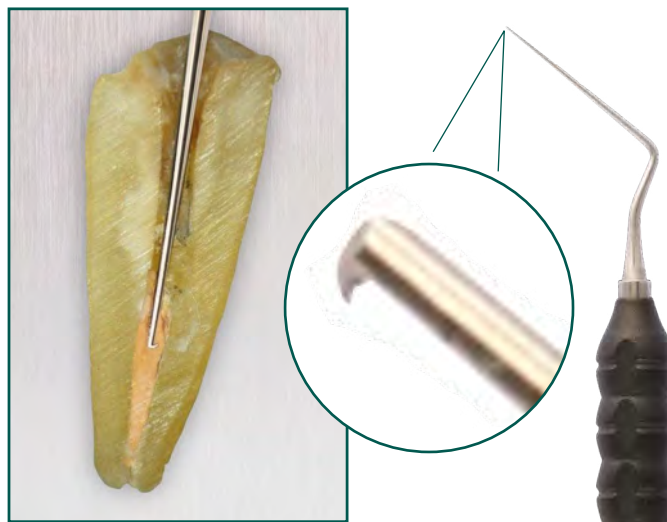

KO8422

26 mm



KO8423

26 mm



KO8424

18 mm



KO8425

18 mm



KO8426

18/26 mm



Senza gancio, punta **rivestite in diamante** per la rimozione della guttaperca e la penetrazione di canali calcificati o incassati



Yoshitsugu Terauchi
D.D.S., Ph.D.

Il Dr. Terauchi è docente part-time presso la Tokyo Medical & Dental University e dal 1998 svolge un'attività privata limitata all'endodonzia. Ha conseguito il titolo di DDS nel 1993 e ha completato la specializzazione presso la Tokyo Medical & Dental University nel 1995, dove ha anche conseguito il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di endodonzia. Ha pubblicato diversi articoli su riviste specializzate a livello nazionale e internazionale. È inoltre autore di diversi capitoli di libri di testo, tra cui l'undicesima edizione di "Pathways of the Pulp". Ha tenuto conferenze a livello nazionale e internazionale ed è apparso due volte sulla TV nazionale, per parlare di endodonzia moderna.

SONDE



KO6699
Sonda DG16



KO3249
Sonda DG16 N - Extra Fine



KO9200
ENDOBLACK®
Sonda DG16



Rispetto alla sonda 17 convenzionale, è necessaria una piccola ampiezza per trovare l'accesso al canale radicolare

KO9214
ENDOBLACK®
Sonda DG17/17L modificata



KO9212
ENDOBLACK®
Sonda Parodontale CP12/CP15



KO9201
ENDOBLACK® - ø 0,45 mm
Sonda KX1 dritta



KO9202
ENDOBLACK® - ø 0,35 mm
Sonda KX2 angolata

SPREADER, SPATOLE e PINZETTA

Spreader

KO7536

20

KO7537

30

KO7538

40

KO7539

50



KO9205

Spreader 20/30 ENDOBLACK®



KO9206

Spreader 40/50 ENDOBLACK®



KO9213

ENDOBLACK®

Spatola di riempimento HEIDEMANN I



KO9219

ENDOBLACK®

Spatola con righello per endodonzia



KO4095

Pinzetta con manico liscio

Pinzetta endodontica con blocco

PLUGGER e MICRO PLUGGER

Plugger

KO7532

0,6 mm

KO7533

0,8 mm

KO7534

1,0 mm

KO7535

1,2 mm



KO8409

Plugger 0,40 / 0,55 mm
Trinovo PEEK black



KO9207

ENDOBLACK®
Plugger 1/2 (060/080)



KO9208

ENDOBLACK®
Plugger 3/4 (100/120)



KO9203

ENDOBLACK®
Micro Plugger D1 ø 0,6 mm



KO9204

ENDOBLACK®
Micro Plugger D2 ø 1,0 mm

SPECCHIETTI e MICRO SPECCHIETTI



KO9218

Impugnatura per specchietto
Senza specchietto



KO9218-DE

Impugnatura per specchietto
doppio - Senza specchietto



KO4515-CC

Rhodium 4 ø 22 mm
Conf. da 12 pz.



KO4516-CC

Rhodium 5 ø 24 mm
Conf. da 12 pz.



Doppio specchietto
Rhodium 4 ø 22 mm


KO5597
KO5597-CS*

Conf. da 6 pz.

Doppio specchietto
Rhodium 5 ø 24 mm

KO9575
KO9575-CS*

Conf. da 6 pz.

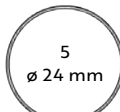

Conf. da 12 pz.

Ingrandente

Piatto

KO4337

Ø 22 mm

KO4339

Ø 22 mm

KO4340

Ø 24 mm

KO4515

Ø 22 mm - Rhodium

KO4338

Ø 24 mm

KO4339-CS*

Ø 22 mm

KO6083*

Ø 24 mm

KO4516

Ø 24 mm - Rhodium

INFO

Tutti gli specchietti e i manici degli specchietti hanno una filettatura europea (gambo semplice), se non diversamente indicato.

**compatibile con manici Cone
Socket o con filettatura americana*



KO6412-CC

ENDOBLACK®

Micro specchietto Rodio - ø 3 mm

Conf. da 1 pz.



KO6413-CC

ENDOBLACK®

Micro specchietto Rodio - ø 5 mm

Conf. da 1 pz.



KO6414-CC

ENDOBLACK®

Micro specchietto Rodio - 3x6 mm

Conf. da 1 pz.



KO8395

Mini Specchietto Rodio - ø 10 mm

Conf. da 1 pz.



KO8396

Mini Specchietto Rodio - ø 12 mm

Conf. da 1 pz.



KO8397

Mini Specchietto Rodio - ø 14 mm

Conf. da 1 pz.

IRRIGAZIONE




Irrigazione canalare a pressione negativa e Sistema di attivazione

Il sistema iVac è stato creato utilizzando i tre concetti più importanti stabiliti dalla ricerca endodontica:

La **vibrazione ultrasonica** che crea un catalizzatore chimico per le soluzioni irriganti insieme a una cavitazione temporanea e ad effetti di microstreaming, con la conseguente azione di pulizia chimico-meccanica nelle aree di difficile accesso del canale radicolare.

Pressione apicale negativa, mediante la quale il fluido di irrigazione si sposta dalla camera pulpare all'area apicale senza causare fuoriuscite del liquido irrigante oltre il forame apicale.



Il principio dell'**irrigazione continua**, secondo cui il volume dell'irrigante viene rinnovato continuamente. Il costante ricambio dell'irrigante provoca un'attività chimica ideale.

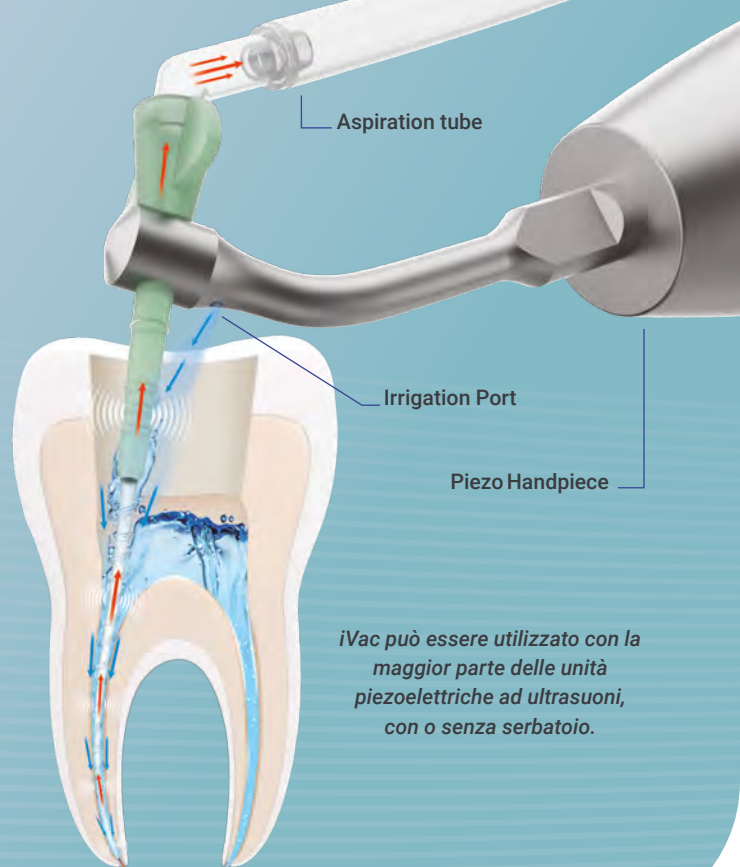


Il meglio di tutti i sistemi di irrigazione in un unico prodotto sicuro ed intuitivo

- iVac™ utilizza la pressione negativa che evita il rischio di estrusione dell'irrigante permettendo a quest'ultimo di pulire e disinfettare l'intero canale radicolare in tutta la sua lunghezza^{1,2}.
- iVac™ è estremamente utile nei casi in cui il controllo della profondità dell'irrigazione è essenziale³, come nel caso di denti giovani, casi di apicificazione, rigenerazione e riassorbimento del forame apicale.
- iVac ha un design che permette il continuo scambio e rinnovo di irrigante, attivato con ultrasuoni, nel canale radicolare durante il trattamento.
- Può pulire e disinfettare efficacemente le irregolarità del sistema canalare con l'azione dell'irrigazione continua a ultrasuoni^{4,5,6}.
- La microcannula in polimero permette un'efficace attivazione ultrasonica⁷ dell'irrigante anche nei canali più curvi e irregolari.
- Il sistema iVac è semplice da utilizzare e ha un funzionamento intuitivo. Può essere utilizzato con i principali apparecchi piezo ultrasonici in commercio (Type-S o E), con o senza serbatoio.
- Oltre alla vibrazione ultrasonica i diametri esterno ed interno della cannula riducono notevolmente il rischio di intasamento.

Volume di soluzione irrigante estrusa dal forame apicale²

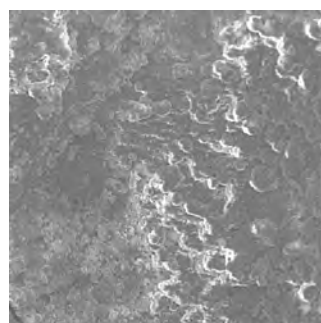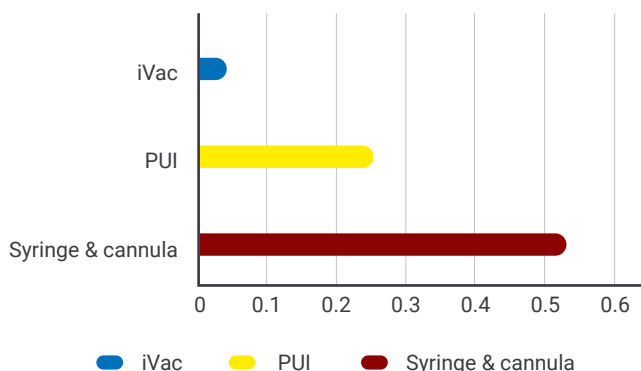

Parete del terzo apicale dopo la strumentazione

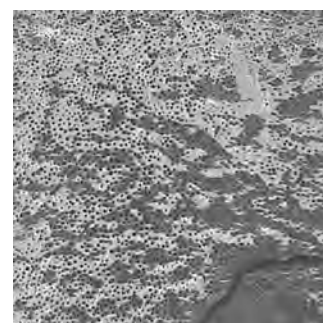

Parete del terzo apicale dopo il protocollo di irrigazione finale iVac⁸

1. Desai P, Himel V. JOE 2009 Apr;35(4):545-9.

2. Gomes, B. Extrusion Preliminary Report – iVac. UNICAMP, Brazil, 2022. In Press.

3. Mitchell RP, Yang SE, Baumgartner JC. JOE 2010 Feb;36(2):338-41.

4. Layton G et al. JOE 2015 Jun;41(6):884-9.

5. Nielsen BA, Craig Baumgartner JOE 2007 May;33(5):611-5.

6. Siu C, Baumgartner JC. JOE 2010 Nov;36(11):1782-5.

7. Doppler Vibrometry Analysis. Preliminary report results. Akisue, E. POLI, USP, Brazil, 2022. In Press.

8. Data and images courtesy of Marco A. Hungaro Duarte, DDS, MS, PhD, USP, Brazil.

N5™ G-Clor

La soluzione per il lavaggio canalare d'eccellenza

N5™ G-Clor Sodio ipoclorito al 5% in cloro attivo

Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5% per l'irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio.

L'elevata qualità del confezionamento primario in vetro garantisce una stabilità maggiore del prodotto nel tempo.

Caratteristiche funzionali del prodotto:

- ✓ Elevata capacità di dissoluzione della componente organica grazie all'elevata concentrazione e l'elevato pH;
- ✓ Elevata attività antimicrobica anche nei confronti di Enterococcus Faecalis.

CONFEZIONE: Flacone multidose da 250 ml.

COMPOSIZIONE: Sodio Ipoclorito titolato al 5% in cloro attivo

SIMIT NEXT
ENDO EXPERT



IrriFlex®

Ago flessibile per l'irrigazione canalare

FLESSIBILITÀ

A differenza dei tradizionali aghi metallici, IrriFlex® si adatta facilmente all'anatomia dei canali radicolari, anche a quelli più complessi. La flessibilità della cannula in polipropilene permette un accesso apicale senza resistenza o danni alle pareti dentinali.

EFFICACIA

Alle sue estremità, IrriFlex® è dotato di 2 aperture laterali situate alla stessa altezza. Questa caratteristica unica gli conferisce un'equilibrata espulsione dell'irrigazione attraverso due precisi getti orientati direttamente contro le pareti dentinali. La conicità della cannula segue la forma del canale. Man mano che il liquido sale verso la porzione coronale, lo spessore del flusso d'irrigazione è costante, massimizzando la forza di taglio e la rimozione di detriti, fango dentinale e biofilm. La cannula IrriFlex® è realizzata in Svizzera. Prodotta in camera bianca, viene consegnata in confezione singola.

Compatibile con EDTA 17%, ipoclorito 5,25%, clorexidina 2%, acido citrico 40%.

Disponibile anche nella versione con Stopper Endodontici inclusi nella confezione (Conf. da 40 IrriFlex e 50 Stopper)



connessione
luer lock

27mm
lunghezza di lavoro



Siringhe colorate IrriGance™

Siringhe bianche, rosse e nere con volumi di 3, 5 e 10 ml, confezionate singolarmente.

Le siringhe IrriGance™ Color sono una gamma di siringhe **Luer Lock** progettate per l'irrigazione canalare nei trattamenti endodontici. I loro pistoni colorati consentono una chiara organizzazione degli irriganti in base al tipo (EDTA, ipoclorito di sodio, soluzione salina, ecc.). La gamma è disponibile nei formati da 3, 5 e 10 ml.

Vantaggi:


L'utilizzo di un sistema di codifica a colori per ogni tipo di irrigante aiuta a organizzare i vassoi degli strumenti, riduce il rischio di errori e fa risparmiare tempo prezioso alla poltrona.

Le siringhe sono realizzate con materiali di grado medico, sono prive di bisfenolo A e sono confezionate singolarmente in un ambiente sterile.

Confezionamento:

Le siringhe sono disponibili in confezioni da 30 siringhe (10 ml) o 50 siringhe (3 ml e 5 ml) in un unico colore a scelta (bianco, rosso o nero).

È disponibile anche una versione assortita contenente 30 siringhe da 5 ml, di cui 10 siringhe per ogni colore.

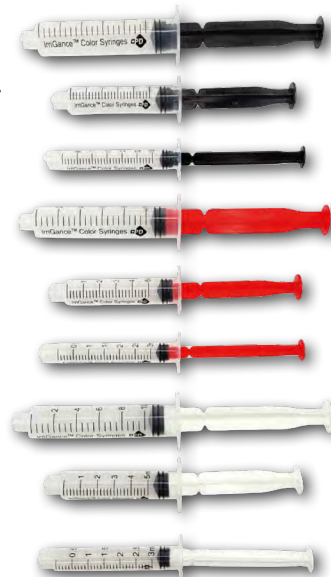


OTTURAZIONE



Otturatore endodontico

Otturatore endodontico

Un nucleo polimerico radiopaco con una guttaperca termoplastica

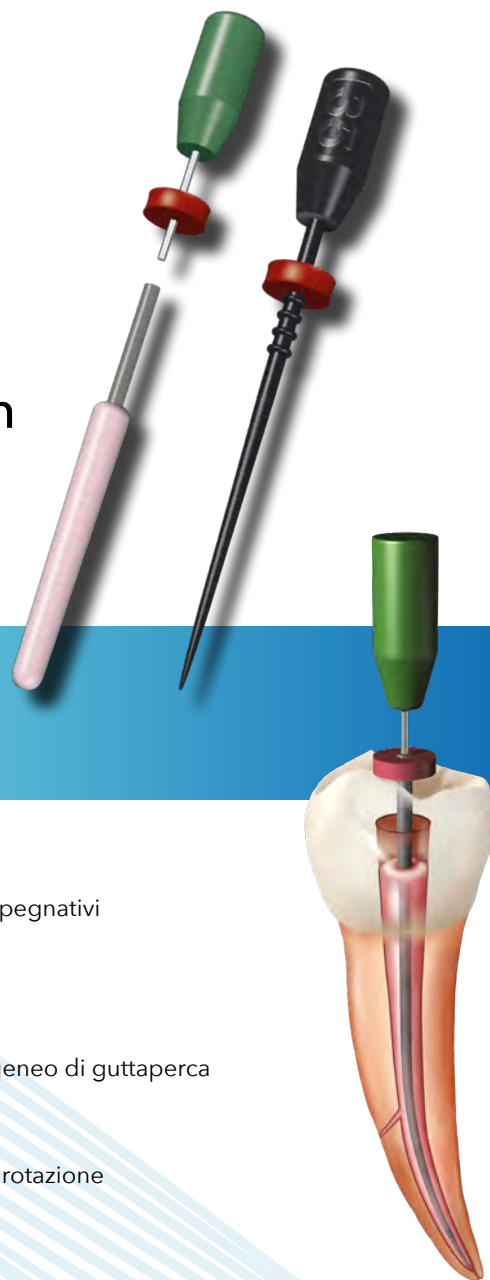

Vantaggi

- La flessibilità rende possibile il riempimento anche dei canali radicolari più impegnativi
- Veloce, efficiente, affidabile
- Compatibile con qualsiasi conicità della preparazione del canale radicolare
- Il carrier centrale più sottile garantisce un riempimento più uniforme ed omogeneo di guttaperca
- Adatto al riempimento di canali stretti, curvi e lunghi
- Facile da usare e con rimozione semplice del manico dalla guttaperca tramite rotazione
- Clinicamente testato da oltre 18 anni

- Veloce, efficiente, affidabile

- **Compatibile con qualsiasi conicità della preparazione del canale radicolare**

- Il carrier centrale più sottile garantisce un riempimento più uniforme ed omogeneo di guttaperca

- Adatto al riempimento di canali stretti, curvi e lunghi

- Facile da usare e con rimozione semplice del manico dalla guttaperca tramite rotazione

- Clinicamente testato da oltre 18 anni

Il carrier degli **otturatori Soft-Core®** è più sottile rispetto ai principali otturatori carrier-based in commercio, consentendo una maggiore flessibilità per il posizionamento anche nei canali più curvi.

Un carrier più sottile significa anche più guttaperca per avere ogni volta riempimenti più densi


Guttaperca naturale

La **guttaperca Natural GP™** utilizzata per il nostro otturatore endodontico **Soft-Core®** viene lavorata con gomma grezza naturale raccolta da alberi della gomma indonesiani.

Tutta la produzione viene eseguita da **CMS Dental A/S in Danimarca** secondo specifiche tecniche esatte.

Gli ingredienti della **guttaperca Natural GP™** sono privi di componenti tossici.

Ogni fase di produzione per ogni lotto di **Natural GP™** è rigorosamente controllata per garantire una qualità ottimale del prodotto.

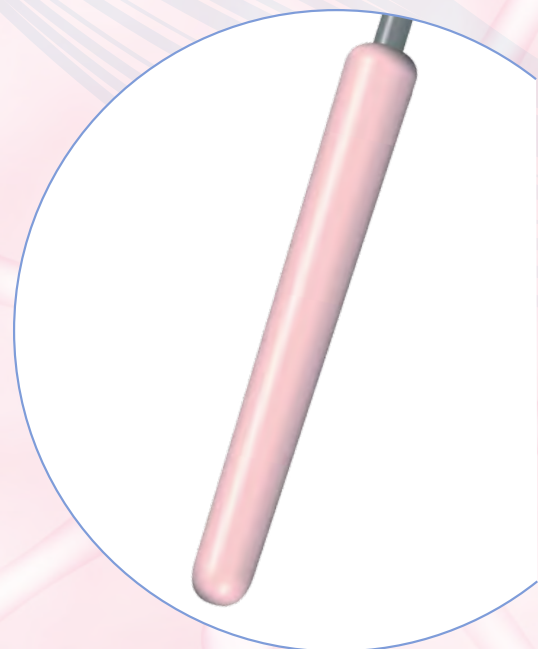

Soft-Core®

Fornetto

Vantaggi



- Riscaldamento istantaneo
- Possibilità di scaldare 4 otturatori contemporaneamente
- Mantiene gli otturatori caldi e pronti all'uso per 15 minuti

Un canale radicolare otturato tridimensionalmente significa che anche eventuali canali laterali e canali accessori sono stati riempiti correttamente.

Il design unico dell'otturatore endodontico Soft-Core® lo rende la scelta ideale per diversi motivi:

- L'impugnatura dell'otturatore può essere piegata per facilitare il trattamento dei denti posteriori.
- Il carrier è ricoperto con guttaperca flow.
- Un singolo otturatore riempie l'intero canale e, grazie alla forza idraulica, la guttaperca calda viene portata facilmente in apice.
- L'otturatore ha un sottile carrier ovale che fornisce un eccellente afflusso della guttaperca coronalmente.

NeoSEALER[®] Flo


Sigillante Bioceramico di nuova generazione

NeoSEALER[®] Flo è un sigillante canale bioceramico con proprietà di manipolazione superiori, che promuove la formazione di idrossiapatite per innescare il processo di guarigione.

- NeoSEALER[®] Flo è progettato con cura per promuovere il posizionamento e massimizzare la bioattività.
- Promuove la formazione di idrossiapatite sulla superficie per sigillare e supportare la guarigione attraverso il rilascio di ioni calcio e idrossido.
- Biocompatibile, non citotossico, non genotossico, inizialmente ad alto pH (alcalino / basico), che si è dimostrato antimicrobico in vitro.

Formulato con più cemento bioattivo di altri sigillanti bioceramici.^{2,3}

MTA è il materiale bioattivo che promuove il posizionamento e supporta la guarigione.

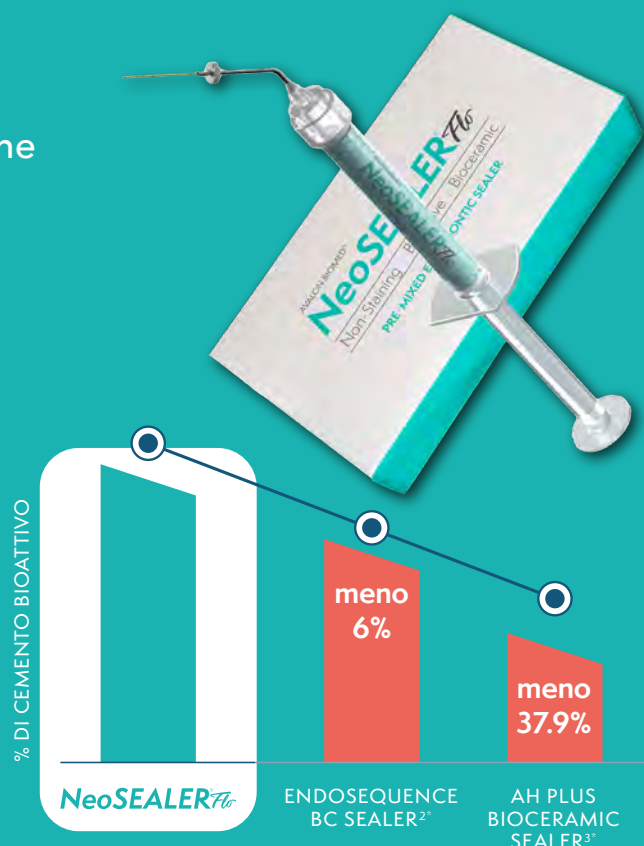

Senza Resina

NeoSEALER[®] Flo è privo di resina per la massima bioattività e biocompatibilità.

Alta Osteogenicità

Non macchia

Elevata Radiopacità

NeoSEALER[®] Flo contiene ossido di tantalio che garantisce un'elevata radiopacità.

L'ossido di tantalio ha un numero atomico più alto e fornisce una radiopacità superiore a quella dell'ossido di zinco che viene usato più frequentemente.

NeoSEALER[®] Flo pur mantenendo un'eccellente radiopacità, consente di avere un maggiore contenuto di cemento.




Courtesy of
Alejandro Podolsky, DDS Endodontist

Courtesy of
Ron Hill, DDS, MSD Endodontist

Tempo di indurimento più rapido rispetto ai più noti sigillanti bioceramici

Per assicurare un completo sigillo, minimizzando il rischio di micro-infiltrazioni

- Ideale per procedure odontoiatriche a contatto dei tessuti periradicolari, compresa l'otturazione e la sigillatura dei canali radicolari.

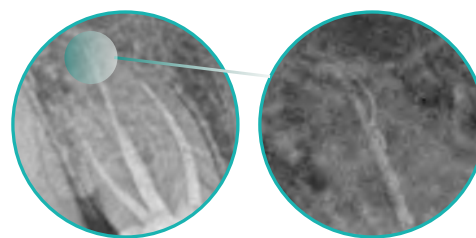

raggiunge
la profondità
dei canali laterali

Ottimizzato sia per l'otturazione verticale a caldo che a cono singolo

NeoSEALER[®] Flo non si condensa e non bolle durante l'otturazione a caldo garantendo la massima flessibilità nell'utilizzo di un prodotto senza doverlo riposizionare, per semplificarne la pratica quotidiana.

Adoro la scorrevolezza di Avalon Biomed NeoSEALER[®] Flo. Riveste uniformemente le pareti del canale ed è facile la detersione della camera dopo l'otturazione.

- Ryan Walsh, DDS, MS Endodontist

² NeoSEALER[®] Flo contiene il 6% in più di cemento bioattivo in peso rispetto a EndoSequence BC Sealer[®] (dati interni ottenuti tramite analisi XRD)
³ NeoSEALER[®] Flo contiene il 37,9% in più di cemento bioattivo in peso rispetto ad AH Plus Bioceramic[®] (dati interni ottenuti tramite analisi XRD)

* non sono marchi registrati di Avalon Biomed


Costruisci il tuo kit NeoSEALER® Flo



Flex Flo Tip

Più precisione e 81% di spreco in meno di prodotto

- Progettato per garantire l'81% di spreco del prodotto in meno rispetto agli aghi convenzionali
- Stopper integrato per la precisione del posizionamento
- Punta flessibile calibro 25,5 per raggiungere in profondità i canali più piccoli

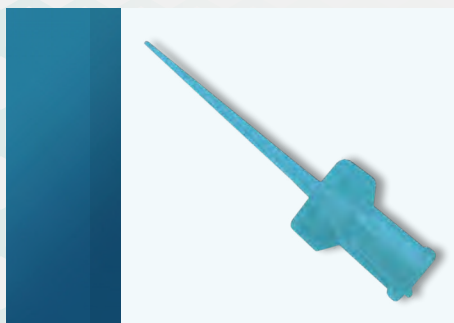

Basic Flex Tip

Massimo livello di adattabilità e 29% di spreco in meno del prodotto

- Progettato per ridurre del 29% lo spreco del prodotto rispetto agli aghi convenzionali
- Altamente flessibile per seguire l'anatomia del canale
- Punta flessibile e rifilabile calibro 25

Al contrario delle resine inerti e dei materiali a base di ZOE, MTA fornisce la tecnologia all'avanguardia per promuovere la bioattività per supportare la guarigione.

- Dopo il posizionamento di MTA nel dente, i fluidi del corpo penetrano nella pasta attivandone la presa.
- Durante questo processo, il calcio e gli ioni di idrossido vengono rilasciati dall'MTA, promuovendo la formazione di idrossiapatite (HA) sulle superfici dell'MTA.
- Quando l'idrossiapatite ricopre la superficie, nasconde l'MTA sottostante riducendo al minimo la reazione al corpo estraneo e stimolando così le risposte di guarigione dei tessuti pulpari e periapicali.

Dimensionalmente stabile

A differenza dei sigillanti a base di resina, NeoSEALER Flo® è dimensionalmente stabile rispetto allo standard ADA.

ADA 57 std. <1% contrazione & <0.1% espansione


Tempo di lavorazione esteso



* indurimento in vivo in presenza di umidità

Elevata fluidità

Particelle di piccole dimensioni permettono un'eccellente fluidità per riempire e sigillare anche i canali laterali

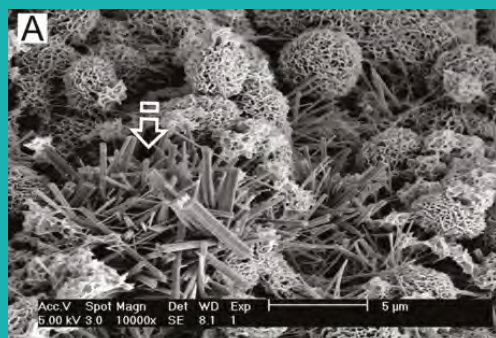

Cristalli precipitati di fosfato di calcio sparsi sulla superficie di silicato tricalcico idratato¹



Immagine ad alto ingrandimento dei cristalli di fosfato di calcio²

NeoPUTTY

Lo standard superiore tra i Putty Bioceramici attivi

NeoPUTTY™ è premiscelato e ottimizzato per una manipolazione e un posizionamento più efficienti.


Il suo film compatto, non appiccicoso, resistente al risciacquo, unitamente alla bioattività, lo rende il putty migliore per lo svolgimento delle procedure quotidiane più importanti.

NeoPUTTY™ garantisce prestazioni eccellenti per le procedure dentali a contatto con la polpa vitale ed il tessuto periradicolare:

- Incappucciamento diretto e indiretto della polpa
- Pulpotomia parziale
- Sottofondo
- Pulpotomia e Apexogenesi
- Riparazione di perforazione
- Riassorbimento radicolare
- Otturazione radicolare
- Apacificazione delle radici
- Otturazione apicale

Superiore radiopacità della sua categoria

Radiopacità 8.4 mm Al equivalente.

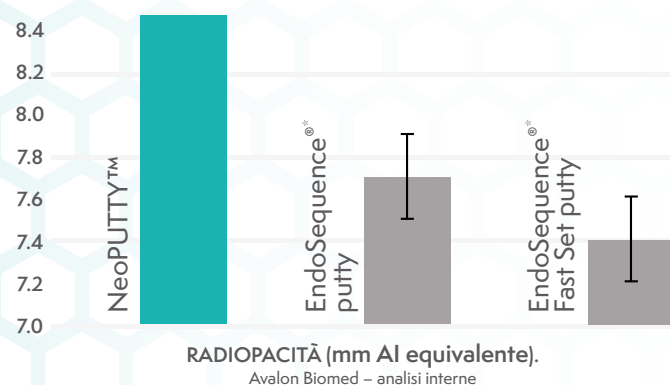

Tempo di lavoro prolungato



* Indurisce in vivo in presenza di umidità

Elevato pH

Per promuovere la risposta osteogenica.

Bioattività su base MTA

Forma idrossiapatite per garantire una sigillatura bioattiva.

Consistenza solida non appiccicosa

Il putty uniforme, consistente e non appiccicoso rende il posizionamento e la condensazione più facili.

* Non sono marchi registrati di Avalon Biomed



Una volta esposto all'umidità atmosferica NeoPutty™ garantisce un tempo di lavoro prolungato. Da una prospettiva citotossica in vitro, NeoPutty™ può essere considerato più biocompatibile rispetto al putty EndoSequence*

Source: Qin Sun, Meng Meng, Jeffrey N. Steed, Stephanie J. Sidow, Brian E. Bergeron, Li-na Niu, Jing-zhi Ma, Franklin R. Tay, Manoeuvrability and biocompatibility of endodontic tricalcium silicate-based putties, Journal of Dentistry, Volume 104, 2021, 103530, ISSN 0300-5712

Siringa a zero spreco



Siringa a zero spreco con pistone di estrusione positivo

Non si secca

tra un utilizzo e l'altro, mantenendo la consistenza ideale durante l'intera procedura.

Non Macchia

I denti non scoloriranno MAI

Privo di Resine

per massimizzarne la bioattività.

NeoMTA® 2



Un prodotto per ogni procedura

L'esclusivo gel NeoMTA® 2 consente di miscelare e ottenere una consistenza spessa tipo putty o fine come un sigillante (vedi video a fondo pagina), con prestazioni che ti permettono di raggiungere migliori risultati per i tuoi pazienti.

Un prodotto per le tue procedure più importanti:

- Incappucciamento diretto e indiretto della polpa
- Pulpotomia parziale
- Liner
- Sottofondo
- Pulpotomia
- Apexogenesi
- Riparazione di perforazione
- Riassorbimento
- Sigillatura
- Otturazione
- Apacificazione
- Otturazione dell'apice

Il più efficiente per tempo di lavoro e di presa

NeoMTA® 2 è progettato per consentire migliori proprietà di manipolazione, sia con una consistenza simile ad un sealer sia con una consistenza simile ad un putty.

Il suo tempo di lavoro può essere prolungato se necessario reidratando la polvere con il gel, dando più tempo per completare la procedura.



Miscelato
come un
putty



Miscelato
come un
sigillante

Immediatamente resistente al risciacquo

Rimane dove viene posizionato in modo da consentire la completa procedura in modo efficiente, garantendo un beneficio bioattivo.

Con 0% di perdita di peso, NeoMTA® 2 è più stabile rispetto ai principali concorrenti

PRIMA	DOPO	
		0% Perdita di peso
		51.8% Perdita di peso
		88.4% Perdita di peso

Avalon
Biomed NeoMTA® 2

Dentsply Sirona
ProRoot® MTA*

Septodont
Biodentine®3*

Test di risciacquo a 3 minuti dopo la miscelazione a putty.

Analisi interne - Avalon Biomed

* Non sono marchi registrati di Avalon Biomed

Guarda il video



Consistenza Sealer

Guarda il video




Consistenza Putty



Al contrario delle resine inerti e dei materiali a base di ZOE, MTA fornisce la tecnologia all'avanguardia per promuovere la bioattività e supportare la guarigione.

- Dopo il posizionamento di MTA nel dente, i fluidi del corpo penetrano nella pasta attivandone la presa.
- Durante questo processo calcio e ioni di idrossido vengono rilasciati dall'MTA, promuovendo la formazione di idrossiapatite (HA) sulle superfici dell'MTA.
- Quando HA ricopre la superficie, nasconde l'MTA sottostante riducendo al minimo la reazione al corpo estraneo e stimolando così le risposte di guarigione dei tessuti pulpari e periapicali.

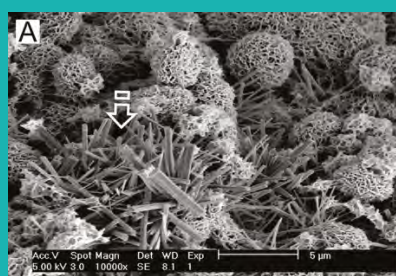

Cristalli precipitati di fosfato di calcio sparsi sulla superficie di silicato tricalcico idratato¹

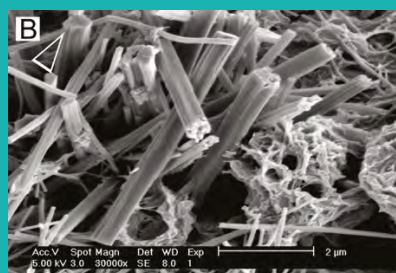


Immagine ad alto ingrandimento dei cristalli di fosfato di calcio²

1. NeoSEALER® Flo contiene il 6% in più di cemento bioattivo in peso rispetto a EndoSequence BC Sealer® (dati interni ottenuti tramite analisi XRD)

2. NeoSEALER® Flo contiene il 37,9% in più di cemento bioattivo in peso rispetto ad AH Plus Bioceramic® (dati interni ottenuti tramite analisi XRD)

Guttaperca Z-Fit


Le punte di guttaperca Z-Fit con **conicità progressiva** sono particolarmente adatte ai canali con una morfologia complessa.

Sono disponibili in due versioni: **Narrow** (N) con diametro in punta di 0.15 e **Wide** (W) con diametro in punta di 0.30.

Entrambe hanno una conicità iniziale del 4% fino al diametro di 0,84 mm, da quel punto in poi proseguono con una conicità dello 0%, per evitare di rimanere bloccate nel terzo coronale.

Confezioni da 60 pezzi

(Ref. ZAGP-701, 702)

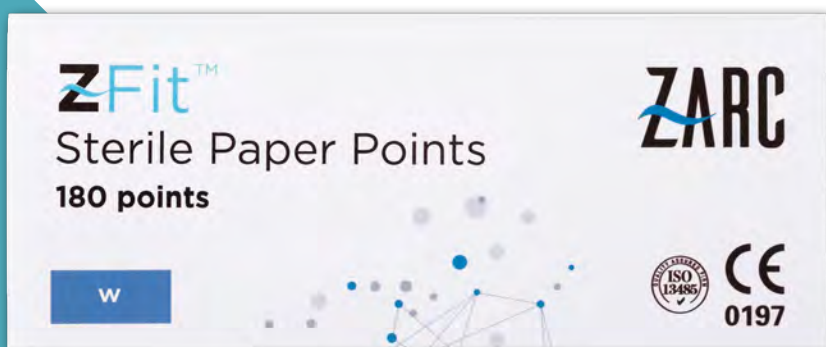

Punte di carta Z-Fit

Le punte di carta sterili Z-Fit con **conicità progressiva** sono particolarmente adatte ai canali con una morfologia complessa.

Sono disponibili in due versioni: **Narrow** (N) con diametro in punta di 0.15 e **Wide** (W) con diametro in punta di 0.30.

Entrambe hanno una conicità iniziale del 4% fino al diametro di 0,84 mm, da quel punto in poi proseguono con una conicità dello 0%, per evitare di rimanere bloccate nel terzo coronale.

Confezioni da 180 pezzi

(Ref. ZASCP-701, 702)

Punte di Carta

Cod. ZAPP48,49,78,79,120,121, 24, 25, 26, 27, 28, 29



Le punte di carta Zarc sono compatte ed estremamente assorbenti permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

Paper Point Zarc **.06/30, .06/25, .04/30, .04/25, .02/15, .02/20, .02/25, .02/30, .02/35, .02/40, X Fine, Fine**

Punte di Carta BlueShaper®

Cod. ZAPP144,145,146,147,148



Punte di carta create appositamente per la sistemica NiTi BlueShaper® Zarc.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e BlueShaper PRO® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Punte di Carta SlimShaper®

Cod. ZAZSPP*ZS2, ZS3



Le punte di carta SlimShaper® sono le punte di carta appositamente create per la sistemica NiTi Slimshaper®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti SlimShaper® e SlimShaper PRO® permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Punte di Carta ApicalShaper®

Cod. ZAPP-430, 435, 440, 450



Le punte di carta ApicalShaper® sono le punte di carta appositamente create per la sistemica NiTi ApicalShaper®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti ApicalShaper® permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Punte di Carta Excalibur®

Cod. ZAZREPP*20, 25, 35, 45




Le punte di carta Excalibur® sono le punte di carta appositamente create per la sistemica NiTi Excalibur®.

Compatte ed estremamente assorbenti, si adattano perfettamente alla forma del canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e permettono di asciugare perfettamente prima dell'otturazione con cono di guttaperca, otturatore carrier-based o cemento.

Punte di carta sterili BlueShaper®

Cod. ZASCPP-144,145,146,147,148

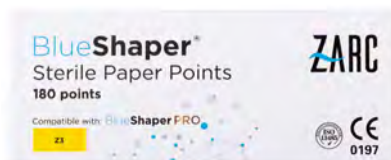

Punte di carta disponibili nel comodo blister da 180 pz , pronte all'uso e studiate appositamente per asciugare i canali sagomati con le sistematiche BlueShaper o BlueShaper PRO.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

Z3, Z4, Z5, Z6, Z7

Punte di carta sterili SlimShaper®

Cod. ZASCPP-201,202,203




Punte di carta estremamente sottili, disponibili nel comodo blister da 180 pz, pronte all'uso e studiate appositamente per asciugare i canali sagomati con le sistematiche mininvasive SlimShaper e SlimShaper PRO.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

ZS1, ZS2, ZS3

Punte di carta sterili Excalibur®

Cod. ZASCPP-320,325,335,345

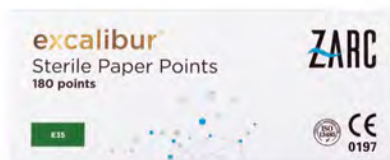

Il diametro delle punte di carta coincide con quello degli strumenti Excalibur. Confezionate in blister sterile da 180 pz. pronte all'uso.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

E20, E25, E35, E45

Punte di carta sterili ApicalShaper®

Cod. ZASCPP-430,435,440,450



Punte di carta disponibili nel comodo blister da 180 pz , pronte all'uso e studiate appositamente per asciugare i canali sagomati con la sistemica ApicaShaper.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

Z30, Z35, Z40, Z50

Punte di carta sterili

Cod. ZASCPP-48,49,78,79,120,121



Utilizzate per assorbire i liquidi del tessuto canalare durante il trattamento endodontico.

Sono disponibili in blister sterile da 180 pz nelle seguenti misure:

04/25 04/30, 06/25, 06/30, Fine, X-Fine

Guttaperca

Cod. ZAGP48,49,78,79,120,121, 24, 25, 26, 27, 28, 29



I **Coni di guttaperca** Zarc si adattano perfettamente al canale e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

Sono disponibili nelle seguenti misure:

Guttaperca Zarc **.06/30, .06/25, .04/30, .04/25, .02/15, .02/20, .02/25, .02/30, .02/35, .02/40, X Fine, Fine**

Guttaperca BlueShaper®

Cod. ZAGP144, 145,146,147,148



I **Coni di guttaperca** disegnati appositamente per la sistematica NiTi BlueShaper® Zarc.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti BlueShaper® e BlueShaper PRO® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

Guttaperca SlimShaper®

Cod. ZAZSSGP*ZS2, ZS3



I **Coni di Guttaperca SlimShaper®** sono disegnati appositamente per la sistematica NiTi SlimShaper®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti SlimShaper® e SlimShaper PRO® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

Guttaperca Excalibur®

Cod. ZAZREGP*20, 25, 35, 45



I **Coni di Guttaperca Excalibur®** sono disegnati appositamente per la sistematica NiTi Excalibur®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti Excalibur® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

Guttaperca ApicalShaper®

Cod. ZAGP-430, 435, 440, 450



I **Coni di Guttaperca ApicalShaper®** sono disegnati appositamente per la sistematica ApicalShaper®.

Si adattano perfettamente al canale sagomato con gli strumenti ApicalShaper® e garantiscono una buona fluidità all'interno del canale radicolare.

MAP SYSTEM

Per il posizionamento dei
materiali da otturazione
endodontici



Il MAP SYSTEM (Micro-Apical Placement System) è un metodo unico ed efficiente per posizionare i materiali da riempimento endodontici tramite otturazione ortograda o retrograda.

Il puntale NiTi a memoria di forma può essere sagomato manualmente in base alle necessità adattandosi facilmente alla forma del canale radicolare.



 Swiss quality
dental products

1 Puntale MAP One Kit

Ref. MAP20296_PP

Lo Starter Kit essenziale ma contenente tutto il materiale necessario per il professionista che si avvicina il sistema per la prima volta.

Contenuto	
1 puntale in NiTi a memoria di forma	● N° 1
16 Pistoni in plastica N° 1	
1 Conf. CleanyFloss	
1 Siringa in acciaio inossidabile	
1 Blocco per impasto in acciaio	



3 Puntali MAP Intro Kit

Ref. MAP20285_PP

Il Kit ottimale per il clinico alla ricerca di flessibilità e precisione.

Contenuto	
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 0
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 1
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 2
16 Pistoni in plastica N° 0	
16 Pistoni in plastica N° 1	
16 Pistoni in plastica N° 2	
1 Siringa in acciaio Inox	
1 Blocco per impasto in acciaio	
1 Conf. CleanyFloss	



1 Puntale MAP VPT

Ref. MAP20288_PP

Una nuova aggiunta alla gamma MAP System per la distribuzione precisa del materiale nella terapia della polpa vitale. L'estensione MAP System è unica per quanto riguarda la sua adattabilità e compatibilità con i materiali più avanzati per la terapia della polpa vitale.

Contenuto	
1 Puntale bianco	● N° 1
1 Siringa in acciaio Inox	
16 VPT Pistoni bianchi N° 1	
1 VPT Scovolino per la pulizia	
1 Blocco per impasto in acciaio Inox	



6 Puntali MAP Surgical Kit


Ref. MAP20287_PP

Il kit dedicato allo specialista di chirurgia che tratta casi complessi di otturazione retrograda.

Contenuto	
1 Puntale Surgical destro N° 0	● N° 0
1 Puntale Surgical sinistro N° 0	● N° 0
1 Puntale Surgical destro N° 1	● N° 1
1 Puntale Surgical sinistro N° 1	● N° 1
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 0
1 Puntale NiTi a memoria di forma	● N° 1
24 Pistoni in plastica N° 0	
24 Pistoni in plastica N° 1	
1 Siringa in acciaio Inox	
1 Blocco per impasto in acciaio	
1 Box in alluminio sterilizzabile 185x145x30mm	




Puntale NiTi a memoria di forma

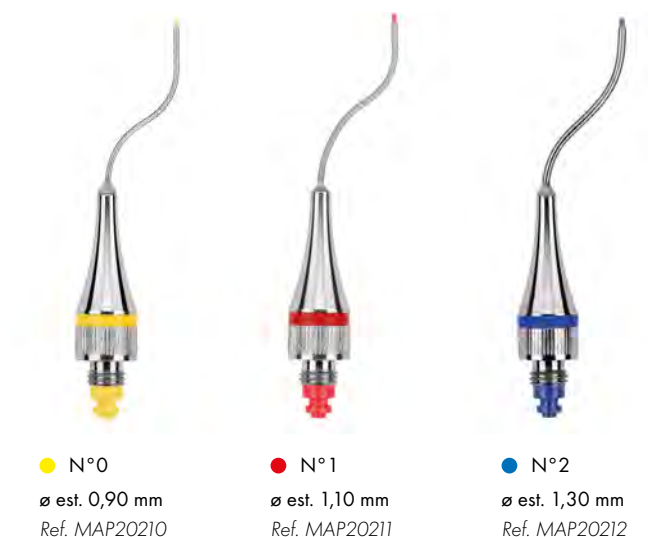

Puntale Curvo Classico




Puntale Uncino

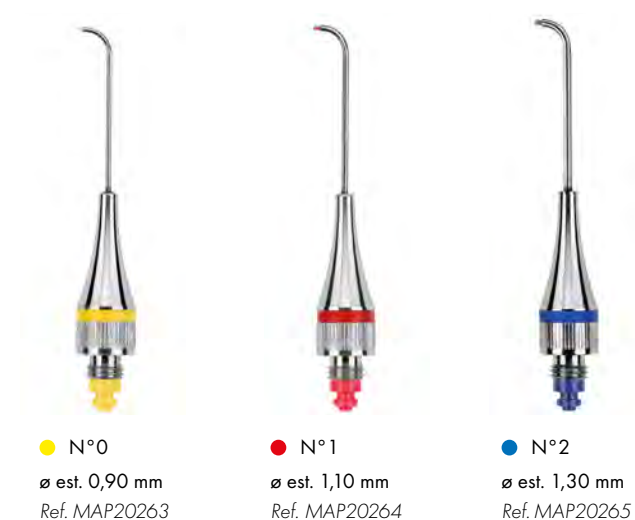

Puntale VPT



Puntale Chirurgico

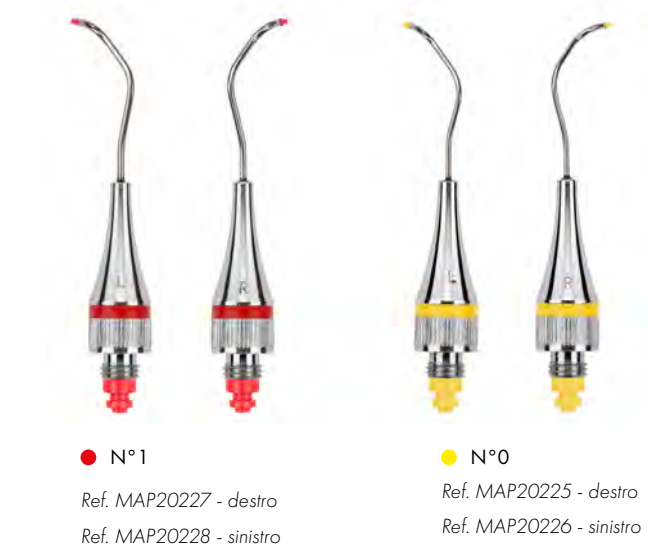

Per la pulizia dei puntali Cleany Floss



EUGENATE DESOBTURATOR

Solvente all'olio di arancio per la rimozione di materiali endodontici



In caso di ritrattamento endodontico, Eugenate desobturator è un solvente a base di olio di arancio puro utilizzato per ammorbidire e successivamente rimuovere con azione meccanica i cementi a base di eugenolo (eugenato) o le punte di guttaperca.

L'ammorbidimento dei materiali per otturazione ne facilita la rimozione meccanica, soprattutto in caso di criticità dovute alla durezza e alla posizione del materiale.

Poiché sono necessarie solo poche gocce di solvente, è possibile ottenere un'erogazione precisa utilizzando un prodotto per dosaggio goccia a goccia.



I risultati hanno mostrato che Xylene, Eugenate Desobturator, Eucalyptol e EDTA possono essere utilizzati per la rimozione di Endofill, Apexit Plus e AH Plus durante il trattamento endodontico con variazioni tra questi sottogruppi; D.W (gruppo di controllo) ha mostrato la minore capacità di dissolvere questi sigillanti.

Il sigillante EndoSequence BC è insolubile nei solventi testati.

Consulta la scheda prodotto sul nostro sito www.simidental.it nella sezione "Download" per scaricare l'articolo completo.

PD™ MTA White

Materiale Endodontico per una riparazione biocompatibile

PD™ MTA White è un cemento di riparazione a base di aggregato di triossido minerale (mineral trioxide aggregate, MTA) formulato con tungstato di calcio e progettato per miscelarsi rapidamente e facilmente, raggiungendo senza sforzi la giusta consistenza per svariate procedure.

Il carattere alcalino del cemento conferisce proprietà antibatteriche e il suo carattere idrofilico favorisce la neoformazione del cemento, creando un ambiente favorevole alla guarigione dei tessuti peri-dentali. Inoltre stimola la formazione di una barriera dentinale direttamente a contatto con la polpa.

L'eccellente biocompatibilità di PD™ MTA White con la parete dentinale e la polpa ne consente l'uso per otturazioni radicolari ortograde e retrograde, per il trattamento dei riassorbimenti radicolari cervicali, come materiale di incappucciamento della polpa, nonché per l'apicizzazione e la pulpotomia dei denti immaturi nei bambini e negli adolescenti.

Privo di ossido di bismuto per evitare macchie e scolorimenti.



Guarda il video



EDTA 17%. Soluzione

Rimozione del fango dentinale

L'EDTA 17% di Produits Dentaires facilita la rimozione della strumentazione e del fango dentinale nella preparazione chimico-meccanica del canale radicolare.

Viene utilizzato per l'irrigazione del canale radicolare, la rimozione di detriti e il risciacquo.

L'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) è un agente chelante che si combina con lo ione calcio e lo inattiva, esercitando così il suo effetto decalcificante sulla dentina.

L'EDTA agisce sulla parte inorganica del fango dentinale e deve essere utilizzato in alternativa alla soluzione di ipoclorito di sodio per completarne la dissoluzione.



Opacal - idrossido di calcio

Opacal è una pasta di idrossido di calcio radiopaca, cremosa e pronta per l'uso per la medicazione intermedia del canale radicolare. Il prodotto è caratterizzato da un pH elevato (superiore a 12).

Quando è necessaria la provvisorizzazione del canale radicolare tra due appuntamenti, la pasta di idrossido di calcio è il materiale standard da utilizzare. Il prodotto ha lo scopo di eliminare i microrganismi rimanenti e prevenire la reinfezione. Le principali proprietà della pasta di idrossido di calcio sono dovute al suo pH alcalino.

La durata abituale del trattamento intermedio è compresa tra 1 e 3 settimane.

Con una radiopacità > 300% della radiopacità della dentina, Opacal è una delle paste di idrossido di calcio più radiopache, garantendo una facile identificazione e un follow-up efficiente.

Opacal è un materiale acquoso non indurente. Questa caratteristica induce un rapido rilascio di ioni e un'azione performante in procedure con tempi di trattamento brevi (R.G. Fava & W.P. Saunderson – Calcium hydroxide pastes: classification and clinical indications). Inoltre, la pasta può essere rimossa facilmente.



Palline di cotone

In fibra di cotone filato in palline, utilizzate per asciugare/assorbire o applicare sostanze durante le procedure odontoiatriche.

Il processo di purificazione avviene con "purificazione mediante ossigeno" (acqua ossigenata), ottenendo un cotone senza alcuna traccia di cloro.

Disponibili nelle seguenti misure

- n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°1 - Ø 8 mm
- n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°2 - Ø 6 mm
- n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°3 - Ø 4.3 mm
- n.1 conf. di Palline di cotone assorbenti n°4 - Ø 3.6 mm



Pipette di plastica 0,3 ml

Le pipette in plastica sono utilizzate per l'erogazione di piccole quantità di liquido nel canale radicolare o nella camera pulpare durante il trattamento endodontico o restaurativo.

L'erogazione del liquido può essere controllata goccia a goccia, consentendo una precisione molto apprezzata, in particolare per i solventi di ritrattamento come Eugenat desobturator di PD (soluzione di olio d'arancia).

Le pipette sono traslucide, flessibili e codificate per colore.

Gli anelli integrati codificati per colore consentono di identificare i diversi liquidi quando si utilizzano più pipette contemporaneamente.




ATTREZZATURA



eHeater

Sistema di otturazione canalare

Ideale per compattare la guttaperca e sigillare i canali radicolari in modo efficiente, migliorando la qualità del trattamento Endodontico e aumentando il successo a lungo termine.

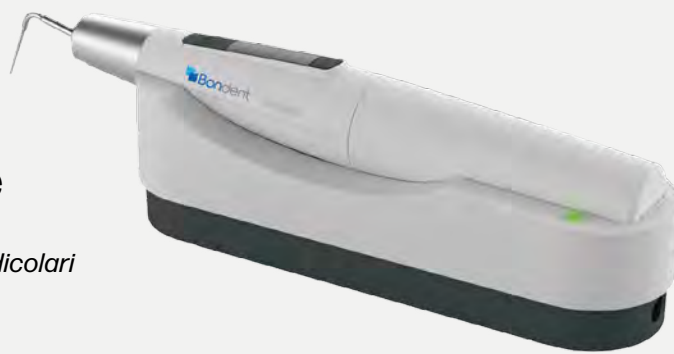

Controllo della temperatura di lavoro:

il riscaldamento della guttaperca viene attivato solo quando necessario, riducendo il rischio di eccessivo calore nella cavità orale;

Adattamento alla morfologia del canale:

la tecnica di compattazione verticale consente di seguire la forma anatomica del canale, anche in quelli curvi o con particolari irregolarità.

Eliminazione di vuoti e micro-spazi:

la guttaperca riscaldata e compattata si adatta meglio alla forma del canale, riducendo al minimo la presenza di vuoti o micro-spazi che potrebbero favorire il passaggio di batteri e causare infezioni.

Sigillo apicale eccellente:

eHeater permette di ottenere un sigillo apicale molto preciso utilizzando gutta-percha riscaldata, che aderisce perfettamente alle pareti del canale radicolare.

Miglior comfort del paziente:

la precisione della tecnica riduce la possibilità di complicazioni post-operatorie, come dolori o infezioni ricorrenti.



Controllo della temperatura di lavoro:

dopo 5 secondi l'ago entra automaticamente in modalità raffreddamento.



Batteria 2600 mAh:

garantisce un utilizzo prolungato. Ricarica completa in 3 ore.



Riscaldamento rapido della punta:

raggiunge 200°C in 2 secondi



Controllo Wireless (Opzionale):

comando a pedale wireless fino a 5m



Luce frontale:

la luce LED consente di vedere meglio all'interno della cavità orale

Confezionamento kit

(Ref. BONSCH1000)

n.1 eHeater

n.4 Plugger orientabili:

- n.1 pz. **40/04**
- n.1 pz. **45/04**
- n.1 pz. **50/04**
- n.1 pz. **55/08**

n.1 Adattatore

n.1 Base di ricarica



Controllo Wireless (Opzionale):
comando a pedale wireless fino a 5m
(Ref. BONPNM000101110001)



Guarda il video

eFiller

Sistema di otturazione canalare

Dispositivo che riscalda la guttaperca in forma solida, rendendola fluida e facile da iniettare nei canali radicolari, garantendo una chiusura tridimensionale efficace e uniforme.



Efficienza e velocità:

eFiller permette di lavorare rapidamente e con efficienza, riducendo i tempi complessivi della procedura endodontica.

Controllo del volume di materiale:

il riempimento controllato consente di aggiungere il materiale gradualmente, minimizzando il rischio di estrusione oltre l'apice radicolare;

Sigillatura tridimensionale ottimale:

il sistema Backfill permette di riempire in modo ottimale la porzione coronale del canale con guttaperca fluida, la viscosità ottimale della guttaperca assicura la condensazione verticale e il riempimento di tutti i canali, compresi quelli accessori.

Ergonomia:

design studiato per essere comodo da usare, permettendo all'operatore di maneggiarlo con facilità e senza fatica.



Controllo della temperatura di lavoro:

il dispositivo mantiene la guttaperca alla giusta consistenza senza rischiare di danneggiarla.



4 temperature di lavoro:

range di temperatura più ampio, adatto alla maggior parte delle punte di guttaperca sul mercato.



Riscaldamento rapido:

tempo di fusione
14 secondi



Design ergonomico:

sensazione di equilibrio
e comfort



4 aghi riutilizzabili:

(23G 24mm, 23G 28mm,
25G 24mm, 25G 28mm)
inclusi nel kit.

Confezionamento kit

(Ref. BONSRCF1000)

n.1 eFiller

n.1 Chiave

n.1 Pistone

n.1 Spazzola per la pulizia

n.3 cappucci in silicone

n.1 Cavo di ricarica

n.1 Base di ricarica

n.4 aghi nelle seguenti misure:

- n.1 pz. **23G** misura **24 mm**
- n.1 pz. **23G** misura **28 mm**
- n.1 pz. **25G** misura **24 mm**
- n.1 pz. **25G** misura **28 mm**



Accessori

Guttaperca (conf. 100pz.)

(Ref. BONDUDGO000025000)



Actor I Pro

Attivatore di irrigazione ad ultrasuoni cordless

Progettato per migliorare l'efficacia dell'irrigazione canalare durante i trattamenti Endodontici.



Ergonomia:

design ergonomico e leggero, facile da impugnare e maneggiare per un utilizzo preciso durante il trattamento endodontico.

Detersione dei canali radicolari ottimale

favorisce una detersione più profonda e completa del sistema canalare migliorando la rimozione del biofilm batterico e dei detriti.

Tecnologia a ultrasuoni silenziosa:

piccola ampiezza delle onde ma ottima potenza. Meno rumore. L'ampiezza della vibrazione della punta può essere regolata in modo da non danneggiare il canale radicolare. La sequenza può essere regolata per garantire l'efficienza della pulizia.

Tempo di lavoro:

utilizzare il dispositivo per 30-60 secondi alla volta alternando le due potenze di lavoro. Dopo 3 minuti di lavoro continuo il dispositivo entra in stand-by automaticamente. Viene emesso un segnale acustico ogni 5 secondi per temporizzare il lavoro.

Ideale come ausilio per l'irrigazione e la disinfezione del canale radicolare.

Garantisce un'elevata efficacia di pulizia anche in caso di trattamenti complessi. Vibrazione ultrasonica ad alta frequenza che rimuove efficacemente residui dal canale radicolare.



2 potenze di lavoro:
modalità normale e ad alta potenza.



Bluetooth:
dotato di un pulsante Bluetooth con indicatore luminoso bluetooth integrato per il collegamento al pedale wireless.



Luce frontale:
offre una migliore visione della cavità orale



Punta in metallo

Confezionamento kit

(Ref. BONSRCW2000)

n.1 Actor I Pro irrigatore

n.1 base di appoggio e ricarica

n.3 cappucci di protezione

n.1 set di 6 inserti:

- n.3 pz. **2002/21**

- n.3 pz. **2502/18**



Endo wise plus

Motore endodontico cordless con rilevatore apicale integrato

Endo Wise Plus è l'evoluzione di Endo Wise:

motore endodontico cordless dotato di rilevatore apicale integrato che offre protezione e sicurezza.



4 modalità di lavoro:

È possibile scegliere tra 4 diverse modalità di lavoro: solo motore endodontico, solo rilevatore apicale, motore e rilevatore apicale, motore e rilevatore apicale con funzionalità automatica.

Sensore automatico:

Si avvia automaticamente quando lo strumento entra nel canale radicolare e si arresta quando esce. Inoltre, la velocità diminuisce automaticamente avvicinandosi all'apice del canale.

Compatibilità:

Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi

Contrangolo 16:1:

Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura

Diverse modalità disponibili:

"Auto reverse", "Reverse", "Auto reciprocante": è compatibile con sistemi di strumentazione meccanica rotante e reciprocante, permettendo di adattarsi a diverse tecniche.

Programmi personalizzati:

Possibilità di salvare in memoria 10 diversi programmi personalizzati (P01-P10)



2 moduli di trasmissione wireless

per lavorare simultaneamente con il localizzatore apicale esterno iRoot Apex e il pedale wireless



Impostazioni di movimento

possibilità di impostare sia il movimento rotatorio continuo (avanti; indietro) che reciprocante



Testina "multiposizione"

consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature



Display OLED incorporato:

uno schermo chiaro e di facile lettura



Batteria:

la batteria si ricarica in ca. 90 minuti

SPECIFICHE TECNICHE

Batteria: 1200mAh / 3,7VDC 100-240VAC. Si ricarica in circa 90'

Dimensioni: 210 x 25 x 27 mm (l'unità centrale include il contrangolo)


Bluetooth: frequenza 2402.0Mhz~2480.0Mhz

Velocità: 150-800rpm

Torque: 0.6 - 4.0 Ncm



Endo wise

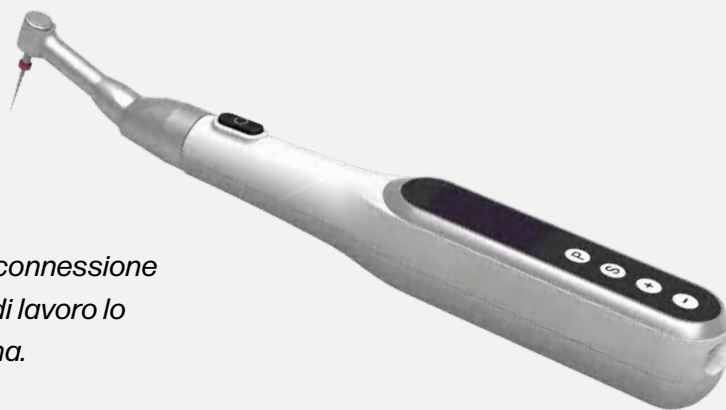

Endo Wise è il motore endodontico cordless:

Il suo design ergonomico, le ridotte dimensioni e la connessione

Bluetooth con il pedale per ottimizzare il processo di lavoro lo

rendono il dispositivo ideale per la pratica quotidiana.

Diverse modalità disponibili:

"Auto reverse", "Reverse", "Auto reciprocante": quando raggiunge il limite di torque. Per esempio, la funzione "Auto Reverse" viene attivata in base a un confronto tra carico e parametro di torque impostato.

Programmi personalizzati:

Possibilità di salvare in memoria 10 diverse impostazioni per l'utilizzo di diversi strumenti Endodontici

Controllo del movimento:

Possibilità di impostare sia il movimento continuo che reciprocante (quest'ultimo in senso orario/antiorario)

Contrangolo 16:1:

Contrangolo 16:1 autoclavabile ad alta temperatura

Compatibilità:

Compatibile con la maggior parte degli strumenti NiTi

Con sensore automatico:

il motore inizia a lavorare quando entra in contatto con la dentina e si ferma automaticamente quando si allontana.



Design Ergonomico
dimensioni ridotte per permettere un'ampia visuale: diametro massimo inferiore ai 28 mm, mentre la parte che si collega al contrangolo è di soli 16 mm.



Stand-by automatico

Il motore va in "stand-by" in automatico dopo 10' di inattività e si riavvia cliccando sul tasto "power".



Testina "multiposizione"

consente di ruotare facilmente e modificare la posizione del contrangolo con 6 diverse angolature.



Display OLED incorporato:

per una migliore visibilità e facilità d'uso.



Batteria:

La batteria si ricarica completamente in ca. 180 minuti attraverso un cavo Micro-USB, permettendo l'uso per un lungo periodo.

SPECIFICHE TECNICHE

Batteria: 1000 mAh / 3.7VDC 100-240VAC

Dimensioni: 206x26x28 mm (l'unità centrale include il contrangolo)

Torque: 0.6 - 4.0 Ncm (**Controllo del torque** e della velocità)

Velocità: Max 800rpm

Peso: 125gr

Collegamento con rilevatore apicale con cavetto Micro-Usb

Wispex

*Localizzatore apicale con **tecnologia avanzata multifrequenza** che, grazie alle ridotte dimensioni, all'auto calibrazione e all'alta precisione sia nei canali bagnati che nei canali asciutti, risulta essere semplice e comodo da trasportare e posizionare all'interno dello studio.*



Display colorato e avviso sonoro:

Sul display compare una scala colori che identifica la posizione dello strumento nel canale radicolare. Wispex avvisa quando il file endodontico è a meno di 2,2 mm dall'apice.

Cavetto Micro-USB:

Se collegato al micromotore iRoot Pro, indica sul display velocità e torque. Il collegamento al micromotore Endo Wise è possibile attraverso cavetto Micro-USB.

Lunghezza di lavoro regolabile:

Lunghezza di lavoro impostabile e modificabile.

Sensitive:

Performance non alterate da sangue o polpa nel canale radicolare e invariate per ogni tipologia di dente.



Tecnologia multifrequenza

calibrazione automatica
per garantire misure
accurate.



Facile da trasportare

grazie alle dimensioni
ridotte.



Display Digitale

schermo TFT ad
alta definizione



Batteria

ricaricabile in
circa 180 minuti

SPECIFICHE TECNICHE

Batteria: 950 mAh / 3.7 V

Dimensioni: 94x60x13 mm

Display: 2.8" TFT color LCD

Adattatore: ~ 100-240 V. 50/60 Hz

Peso: 85 gr

Consumo energetico: $\leq 0,6$ W

iRoot Apex

Localizzatore apicale compatto.

La qualità del suo display con colori reali semplifica il lavoro del professionista nello studio dentistico.



Collegamento Bluetooth:

Si collega via Bluetooth al micromotore Endo Wise Plus, indicando sul display velocità e torque.

Giroscopio di precisione:

iRoot Apex è dotato di un giroscopio ad alta precisione in modo che lo schermo si adatti a diversi orientamenti.

Avviso sonoro:

Il dispositivo emette un segnale acustico sempre più frequente quando la punta del file si avvicina all'apice

Display di alta qualità:

La qualità del suo display a colori semplifica il lavoro del professionista nello studio dentistico.



Tecnologia multifrequenza

Sistema di calibrazione automatica per garantire misure accurate.




Bluetooth

consente la sincronizzazione del localizzatore con Endo Wise Plus.



Display LCD

ad alta risoluzione con ampio angolo di visione. Touch da 3,5"

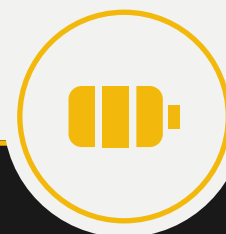

Batteria

ricaricabile in circa 120 minuti e garantisce una durata di circa 5h

SPECIFICHE TECNICHE

Batteria: 1000 mAh / 3.7 V

Dimensioni: 110x65x20mm

Display: 3.5 LCD TFT con ampio angolo di visione

Adattatore: ~ 100-220 V. 50/60 Hz

Peso: 185 gr

Consumo energetico: $\leq 0,6$ W

ACCESSORI



nic tone

La diga di gomma che protegge, sigilla e garantisce il sorriso



- ✓ Si allunga fino al 800% senza strapparsi
- ✓ 70% protezione da rischio infettivo
- ✓ Prodotta con lattice raffinato
- ✓ Protezione e retrazione dei tessuti molli

Eleva la tua pratica clinica con la diga in lattice nic tone, conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità e performance.

Prodotte in lattice raffinato, a basso contenuto di proteine e polvere, le dighe nic tone garantiscono una protezione eccezionale e visibilità.

Con un allungamento fino all'800% senza pericolo di strappi, nic tone si adatta a ogni procedura assicurando massimo comfort e sicurezza ai tuoi pazienti.

COLORI e MISURE DISPONIBILI

● Nero ● Blu ● Verde:

Misure disponibili: **Sottile, Media e Spessa**

SPECIFICHE

Colori:

visibilità ottima in ogni procedura grazie al contrasto ottimale con i tessuti orali;

Flessibilità e resistenza superiori:

fino all'800% di allungamento senza strappi;

Riconoscimento DENTAL ADVISOR 2024

Disegnata specificamente per la protezione (e retrazione) dei tessuti molli assicurando un isolamento efficace e sicuro

INFORMAZIONI SUL CONFEZIONAMENTO

Dighe per adulti 6x6" (15x15cm)

NIC144-0012 Diga dentale **BLU SOTTILE** (36 fogli)
NIC144-0022 Diga dentale **BLU MEDIA** (36 fogli)
NIC144-0032 Diga dentale **BLU SPESSE** (36 fogli)
NIC144-0039 Diga dentale **BLU EXTRA SPESSE** (36 fogli)
NIC144-0013 Diga dentale **VERDE SOTTILE** (36 fogli)
NIC144-0023 Diga dentale **VERDE MEDIA** (36 fogli)
NIC144-0033 Diga dentale **VERDE SPESSE** (36 fogli)
NIC144-0040 Diga dentale **NERA SOTTILE** (36 fogli)
NIC144-0038 Diga dentale **NERA MEDIA** (36 fogli)
NIC144-0037 Diga dentale **NERA SPESSE** (36 fogli)
NIC144-0300 Diga dentale **BLU EASY DAM** (36 fogli)
NIC144-0404 Diga dentale **SINTETICA BLU MEDIA** (15 fogli)

Dighe per pedodonzia 5x5" (12x12cm)

NIC144-0010 Diga dentale **BLU SOTTILE** (36 fogli)
NIC144-0011 Diga dentale **VERDE SOTTILE** (36 fogli)
NIC144-0020 Diga dentale **BLU MEDIA** (36 fogli)
NIC144-0021 Diga dentale **VERDE MEDIA** (36 fogli)
NIC144-0030 Diga dentale **BLU SPESSE** (36 fogli)
NIC144-0031 Diga dentale **VERDE SPESSE** (36 fogli)





MD1675/10 Kit per diga dentale

Contenuto:

MD981/20	Cassetta
MD5550	Pinza foradiga
MD5551	Pinza per ganci
MD5552	Archetto G
MD5553	Archetto M
MD5554	Archetto P
MD5595/00	Gancio N. 00
MD5595/3	Gancio N. 3
MD5595/4	Gancio N. 4
MD5595/12A	Gancio N. 12A
MD5595/13A	Gancio N. 13A
MD5595/27	Gancio N. 27
MD5595/29	Gancio N. 29
MD5595/210	Gancio N. 210
MD5595/212	Gancio N. 212
MD5595/W8A	Gancio N. W8A
MD5605	Tray per ganci

KIT PER DIGA DENTALE MD1675/10

Utilizzato in diverse discipline dall'Endodonzia alla Conservativa, il kit per diga Medesy serve a isolare il dente o i denti da trattare, creando un campo operatorio asciutto e privo di contaminazioni.

Questo strumento è fondamentale in procedure odontoiatriche come otturazioni, devitalizzazioni, sbiancamenti e restauri adesivi.

Funzioni principali degli uncini dentali abbinati al foglio di diga:

- Ancoraggio della diga attorno al dente trattato;
- Stabilizzazione per evitare spostamenti della diga durante la procedura;
- Retratore gengivale per migliorare l'accesso e la visibilità del dente;
- Protezione dei tessuti molli, riducendo il rischio di contaminazione con saliva o sangue.
- Gli uncini sono disponibili in diverse forme e misure, adatte a molari, premolari, incisivi e canini.
- Alcuni hanno ali per un miglior supporto della diga, mentre altri sono senza ali per un posizionamento più agevole.



MD5605
Vassoio porta uncini in acciaio inox

UNCINI DENTALI

ANTERIORI



MD5595/0
Alette ad arco



MD5595/9 | MD5595/9.NE
Universale



MD5595/00 | MD5595/00.NE
Per anteriori e piccoli premolari





MD5595/210 | MD5595/210.NE
1 aletta piccola e 1 aletta grande



MD5595/212
Per cavità Labiali

Nuovi uncini per diga MEDESYS, alta qualità in ogni dettaglio. Grazie all'acciaio di prima scelta e a un trattamento termico speciale, i nuovi uncini per diga MEDESYS mantengono inalterata la loro elasticità per molto tempo. I fori di ancoraggio sono universalmente compatibili con le varie forme di pinze per uncini, mentre i bordi sono smussati per un maggior comfort. Come tutti gli strumenti MEDESYS, i nuovi uncini per diga sono garantiti contro ogni eventuale difetto di materiale o lavorazione per tutta la durata della loro vita.

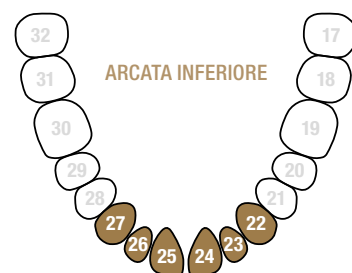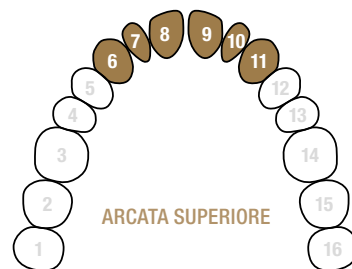

PREMOLARI



MD5595/1
Per premolari superiori



MD5595/1A | MD5595/1A.NE
Alette inclinate





MD5595/2A | MD5595/2A.NE
Per premolari inferiori



MD5595/27 | MD5595/27.NE
Alette arrotondate



MD5595/29 | MD5595/29.NE
Alette arrotondate e piatte

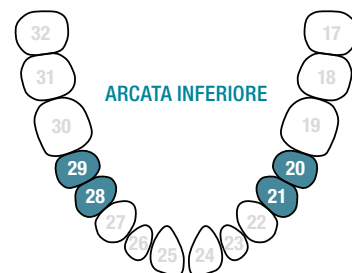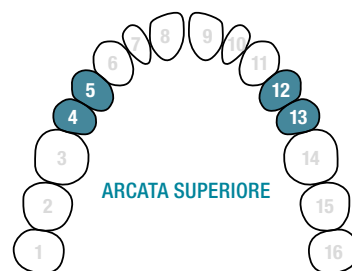

MOLARI (Generale)



MD5595/8A | MD5595/8A.NE

Alette inclinate e arrotondate ai lati



MD5595/14 | MD5595/14.NE

Alette inclinate ideali per molari grandi e parzialmente erotti



MD5595/14A

Come il 14 ma più grande



MD5595/18

Alette arrotondate




MD5595/28

Alette piatte



5595/W8A | 5595/W8A.NE

Per radici di molari, alette inclinate

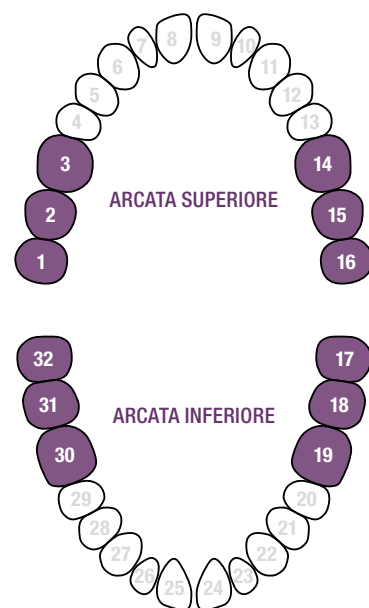

FINITURE

È disponibile una selezione di uncini per diga con trattamento DLC - NERISSIMO per migliorare il contrasto intraorale. Aggiungere ".NE" dopo il codice articolo. Esempio: 5595/14 > 5595/14.NE



Esempio finitura NERISSIMO

MD5595/14.NE



Esempio finitura standard

MD5595/14



MEDESYS
ITALY



MOLARI INFERIORI



MD5595/3 | MD5595/3.NE

Alette piatte, ideale per piccoli molari inferiori



MD5595/7 | MD5595/7.NE

Alette piatte



MD5595/12A | MD5595/12A.NE

Alette dentellate ideali per molari inferiori destri e parzialmente erotti





MD5595/13A | MD5595/13A.NE

Alette dentellate ideale per molari inferiori sinistri e parzialmente erotti



MD5595/56

Alette inclinate ideali per grandi molari inferiori

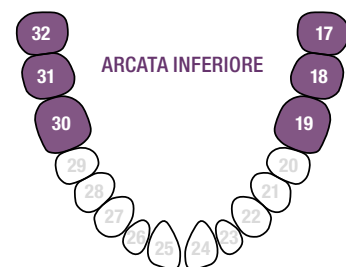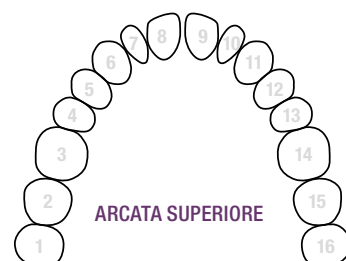

MOLARI SUPERIORI



MD5595/4 | MD5595/4.NE

Alette inclinate, per piccoli molari superiori





MD5595/5

Alette inclinate che seguono la curvatura della gengiva, ideale per grandi molari superiori



MD5595/8 | MD5595/8.NE

Alette inclinate che seguono la curvatura della gengiva

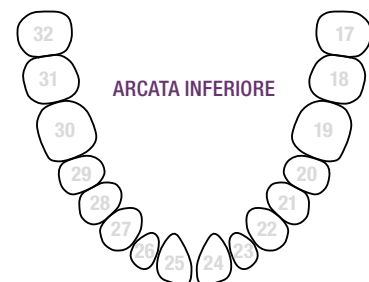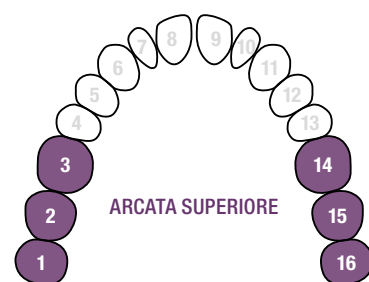

PINZE FORADIGA



Disponibile con
manico liscio
(codice [5560/1](#))

MD5560/2

Ainsworth mm170 (con manico zigrinato)



MD5550


Ivory mm 160

TELAI PER DIGA




MD5554

Telaio per diga piccolo mm 80 x 90

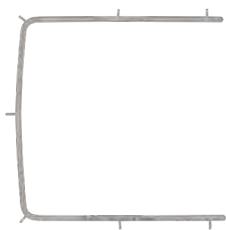

MD5553

Telaio per diga medio mm 110 x 110

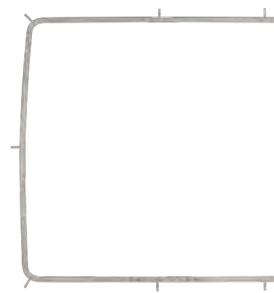

MD5552

Telaio per diga grande mm 140 x 140

PINZE PER UNCINI



MD5551

Ivory mm 170



MD5580

Washington mm 175



MD5570

Brewer mm 175



MD5590

White mm 170

CUADRA

justool

il telaio per diga in metallo all'avanguardia

progettato per migliorare il comfort del paziente e l'efficienza delle procedure. Con il suo formato 16:9, permette un'ampia visibilità del campo operatorio

FACILE POSIZIONAMENTO

Questo telaio all'avanguardia consente un facile posizionamento delle legature sia per i denti superiori che inferiori senza interferire con il naso del paziente, garantendo un'esperienza più confortevole.

ADATTABILITÀ E STABILITÀ

Realizzato con precisione e adattabilità, offre una stabilità e un'accessibilità senza pari, rivoluzionando il modo in cui i professionisti dentali gestiscono l'isolamento durante i trattamenti. Questo telaio ha più pin di qualsiasi altro telaio sul mercato per permettere di tendere a proprio piacimento la diga con sicurezza.


PRECISIONE E CONTROLLO

Le tacche avanzate di Cuadra offrono una stabilità estrema delle legature, migliorando precisione e controllo soprattutto durante le procedure complesse

COMFORT

Eleva il tuo studio con un telaio che mette al primo posto il comfort del paziente, mantenendo i più alti standard di prestazioni cliniche.

Semplifica il tuo lavoro e scegli il massimo comfort per i tuoi pazienti!

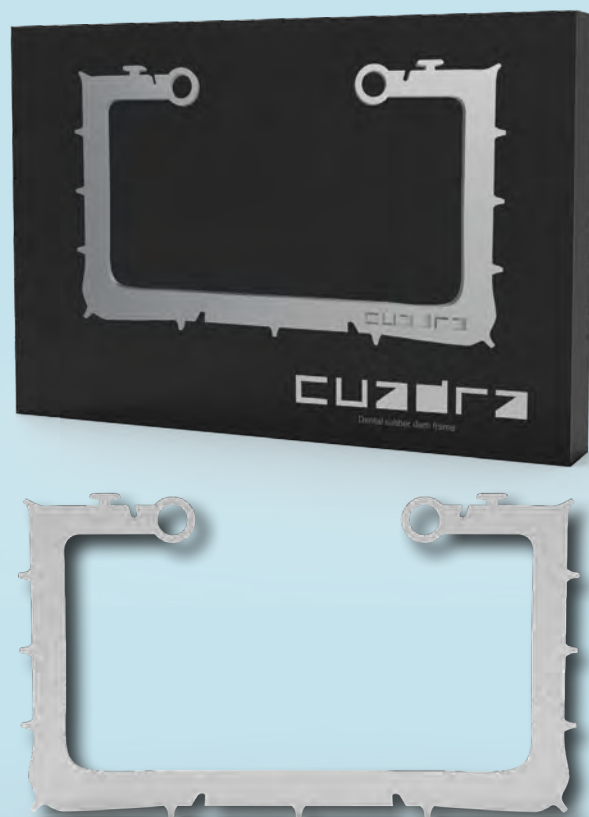

PAC-DAM

Template per diga dentale

Pac-Dam è un pratico template per bucare la diga odontoiatrica in maniera facile e precisa.

FACILE DA UTILIZZARE

PacDam deve essere utilizzato su entrambi i lati in un totale di 4 posizioni, in modo da poter marcare, ad esempio, tutti e 4 i quadranti.

PACDAM È UNICO!

È stata prestata la massima attenzione per ottenere la migliore distanza affidabile tra i fori (molto importante per ottenere isolamenti buoni e affidabili). Una mascherina permette di marcare solo ciò che serve rispetto ai timbri, che marcano tutto e in genere l'inchiostro spesso perde.

COMPATIBILE CON FOGLI 6x6" E 5x5"

Si può usare anche con fogli da 5x5"! Basta allineare l'angolo della diga di gomma al centro dell'occhio di PacDam!

ADATTO A OGNI ESIGENZA

È possibile utilizzare PacDam per tutte le esigenze di isolamento. Non sono necessari altri fori.

PENSATO PER GLI STUDENTI, MA NON SOLO

Non è ovvio e facile fare un singolo foro? Sì, ma pensate agli studenti, ai principianti. Questo è stato sviluppato inizialmente come strumento didattico. Poi è diventato uno strumento utilizzato da tutti. E poi... è cool!

LESS IS MORE

PacDam è stato progettato per essere utilizzato su entrambi i lati. I numeri saranno leggibili su entrambi i lati e... meno è meglio!





Ergo Stand è un accessorio in silicone da appoggiare sul piano di lavoro per l'organizzazione e la pulizia degli strumenti Endodontici.

Ergo Stand è diviso in due sezioni che servono per accogliere due differenti spugne: quella blu, più piccola, serve per trattenere gli strumenti endodontici manuali.

La spugna grigia, invece, serve per pulire le lame degli strumenti endodontici rotanti posizionandoli in movimento al di sopra o all'interno della stessa.

Su Ergo sono presenti due scale millimetriche utili per i coni di carta, quelli in guttaperca e molti altri strumenti endodontici.



Ergo bracciale ed Ergo Stand ti permettono di raggiungere velocemente tutti i tuoi strumenti, installare i file rotanti sul motore endodontico e/o pulire i tuoi strumenti in modo facile ed efficace.

La cosa migliore è che tutti i tuoi strumenti saranno facilmente accessibili e la tua Endodonzia diventerà meno stressante.



Plano è un accessorio disegnato per migliorare l'organizzazione di più materiali endodontici utilizzati durante la fase di otturazione canalare.

Il suo utilizzo è riservato al personale qualificato dello studio odontoiatrico e dell'ambiente ospedaliero.

Con Plano è molto più facile avere i tuoi strumenti nel posto giusto al momento giusto.

Plano offre spazio dedicato e slot per coni di guttaperca e punte di carta. Dispone inoltre di un'area centrale progettata per consentire la miscelazione di materiali bioceramici o MTA e di un essiccatore per asciugare i coni prima di utilizzarli.

Grazie a **Plano**, potrai:

- Disinfettare e inserire i coni di guttaperca in spazi dedicati a ogni canale
- Miscelare e raccogliere il cemento endodontico
- Asciugare i coni di guttaperca prima di inserirli nei canali radicolari
- Alloggiare le punte di carta

Inoltre...

- Plano è un **dispositivo medico di classe I**
- Puoi sterilizzare Plano in autoclave a vapore (134 °C o 273 °F per 4' - ciclo universale classe B)

Disinfettare prima dell'uso

Ogni fessura in Plano è abbastanza profonda da permetterti di versare facilmente un po' di disinfettante e di pulire perfettamente i tuoi coni di guttaperca prima di inserirli nei canali.

Caratteristiche tecniche:

Materiale: 100% Silicone 50 SH (particolari secondo norma ISO3302-M2)

Colore: grigio

Peso: 170 gr

Dimensioni: Ø 120mm - h 17mm



LISTINO PREZZI 2026



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
WO31.01.17.464	AC TIPS - KIT 6 PUNTE ULTRASONICHE - SATELEC	kit	422,96 €	22	290,00 €
WO31.01.17.465	AC TIPS - KIT 6 PUNTE ULTRASONICHE - EMS	kit	422,96 €	22	290,00 €
WOED51	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA ED51 (1 PZ) - SATELEC	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOED52	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA ED52 (1 PZ) - SATELEC	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOED53	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA ED53 (1 PZ) - SATELEC	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOED54	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA ED54 (1 PZ) - SATELEC	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOED55	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA ED55 (1 PZ) - SATELEC	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOE51	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA E51 (1 PZ) - EMS	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOE52	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA E52 (1 PZ) - EMS	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOE53	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA E53 (1 PZ) - EMS	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOE54	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA E54 (1 PZ) - EMS	1 pz	77,12 €	22	55,00 €
WOE55	AC TIPS - PUNTA ULTRASONICA E55 (1 PZ) - EMS	1 pz	77,12 €	22	55,00 €



I prezzi indicati sono IVA esclusa

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
FILE MECCANICI ROTANTI					
ZAZBS25APR04	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z1-Z4 (BLISTER DA 4 FILES)	1 blister	42,71 €	22	29,90 €
ZAZBS21APR04	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z1-Z4 (BLISTER DA 4 FILES)	1 blister	42,71 €	22	29,90 €
ZAZBS31APR04	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z1-Z4 (BLISTER DA 4 FILES)	1 blister	42,71 €	22	29,90 €
ZAZBS16PROZX	BLUESHAPER PRO STERILE 16MM ZXS (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21APROS	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM ZXS-Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR01	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z1 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR02	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z2 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR03	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z3 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR04	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z4 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR05	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR06	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z6 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS21ZPR07	BLUESHAPER PRO STERILE 21MM Z7 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25APROS	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM ZXS-Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR01	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z1 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR02	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z2 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR03	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z3 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR04	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z4 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR05	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR06	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z6 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS25ZPR07	BLUESHAPER PRO STERILE 25MM Z7 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31APROS	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM ZXS-Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR01	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z1 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR02	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z2 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR03	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z3 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR04	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z4 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR05	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR06	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z6 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBS31ZPR07	BLUESHAPER PRO STERILE 31MM Z7 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZSS210PR01	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 21MM ZS1 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS250PR01	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 25MM ZS1 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS310PR01	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 31MM ZS1 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS210PR02	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 21MM ZS2 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAZSS250PRO2	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 25MM ZS2 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS310PRO2	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 31MM ZS2 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS210PRO3	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 21MM ZS3 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS250PRO3	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 25MM ZS3 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS310PRO3	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 31MM ZS3 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS21APR06	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 21MM ZS1-ZS3 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS25APR06	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 25MM ZS1-ZS3 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS31APR06	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 31MM ZS1-ZS3 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	63,01 €	22	41,90 €
ZAZSS21APR03	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 21MM ZS1-ZS3 (BLISTER 3 FILES)	1 blister	32,93 €	22	21,90 €
ZAZSS25APR03	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 25MM ZS1-ZS3 (BLISTER 3 FILES)	1 blister	32,93 €	22	21,90 €
ZAZSS31APR03	SLIMSHAPER PRO STERILE FILES 31MM ZS1-ZS3 (BLISTER 3 FILES)	1 blister	32,93 €	22	21,90 €
ZAZAS2103003	APICALSHAPER STERILE 21MM Z30/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2103503	APICALSHAPER STERILE 21MM Z35/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2104003	APICALSHAPER STERILE 21MM Z40/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2105003	APICALSHAPER STERILE 21MM Z50/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS21ASST1	APICALSHAPER STERILE 21MM Z30-Z50 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	40,86 €	22	28,60 €
ZAZAS2503003	APICALSHAPER STERILE 25MM Z30/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2503503	APICALSHAPER STERILE 25MM Z35/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2504003	APICALSHAPER STERILE 25MM Z40/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS2505003	APICALSHAPER STERILE 25MM Z50/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS25ASST1	APICALSHAPER STERILE 25MM Z30-Z50 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	40,86 €	22	28,60 €
ZAZAS3103003	APICALSHAPER STERILE 31MM Z30/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS3103503	APICALSHAPER STERILE 31MM Z35/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAZAS3104003	APICALSHAPER STERILE 31MM Z40/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS3105003	APICALSHAPER STERILE 31MM Z50/03 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	55,71 €	22	39,00 €
ZAZAS31ASST1	APICALSHAPER STERILE 31MM Z30-Z50 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	40,86 €	22	28,60 €
ZAZZGE00021	Z-GLIDER EVO STERILE FILES 21MM (BLISTER 3 FILES)	1 blister	36,09 €	22	24,00 €
ZAZZGE00025	Z-GLIDER EVO STERILE FILES 25MM (BLISTER 3 FILES)	1 blister	36,09 €	22	24,00 €
ZAZZGE00031	Z-GLIDER EVO STERILE FILES 31MM (BLISTER 3 FILES)	1 blister	36,09 €	22	24,00 €
ZAZCON02521	Z CONDENSOR 21MM 025 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03021	Z CONDENSOR 21MM 030 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03521	Z CONDENSOR 21MM 035 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04021	Z CONDENSOR 21MM 040 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04521	Z CONDENSOR 21MM 045 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON02525	Z CONDENSOR 25MM 025 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03025	Z CONDENSOR 25MM 030 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON03525	Z CONDENSOR 25MM 035 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04025	Z CONDENSOR 25MM 040 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZCON04525	Z CONDENSOR 25MM 045 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	37,14 €	22	26,00 €
ZAZRETREATA	RETREATALL (BLISTER 4 FILES)	1 blister	41,43 €	22	29,00 €
FILE MECCANICI RECIPROCANTI					
ZAZRE2102005	EXCALIBUR STERILE 21MM E20 (BLISTER DA 6 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2502005	EXCALIBUR STERILE 25MM E20 (BLISTER DA 6 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE3102005	EXCALIBUR STERILE 31MM E20 (BLISTER DA 6 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2102505	EXCALIBUR STERILE 21MM E25 (BLISTER DA 6 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2502505	EXCALIBUR STERILE 25MM E25 (BLISTER DA 6 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE3102505	EXCALIBUR STERILE 31MM E25 (BLISTER DA 6 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2103505	EXCALIBUR STERILE 21MM E35 (BLISTER DA 6 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2503505	EXCALIBUR STERILE 25MM E35 (BLISTER DA 6 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	60,00 €	22	42,00 €



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAZRE3103505	EXCALIBUR STERILE 31MM E35 (BLISTER DA 6 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2104505	EXCALIBUR STERILE 21MM E45 (BLISTER DA 6 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE2504505	EXCALIBUR STERILE 25MM E45 (BLISTER DA 6 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE3104505	EXCALIBUR STERILE 31MM E45 (BLISTER DA 6 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	60,00 €	22	42,00 €
ZAZRE21ASST1	EXCALIBUR STERILE 21MM E20-E45 (BLISTER DA 4 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	44,29 €	22	31,00 €
ZAZRE25ASST1	EXCALIBUR STERILE 25MM E20-E45 (BLISTER DA 4 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	44,29 €	22	31,00 €
ZAZRE31ASST1	EXCALIBUR STERILE 31MM E20-E45 (BLISTER DA 4 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	44,29 €	22	31,00 €
ZAZRE21APR01	EXCALIBUR PRO STERILE 21MM E20-E45 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	48,42 €	22	33,90 €
ZAZRE21PRO20	EXCALIBUR PRO STERILE 21MM E20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE21PRO25	EXCALIBUR PRO STERILE 21MM E25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE21PRO35	EXCALIBUR PRO STERILE 21MM E35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE21PRO45	EXCALIBUR PRO STERILE 21MM E45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE25APR01	EXCALIBUR PRO STERILE 25MM E20-E45 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	48,42 €	22	33,90 €
ZAZRE25PRO20	EXCALIBUR PRO STERILE 25MM E20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE25PRO25	EXCALIBUR PRO STERILE 25MM E25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE25PRO35	EXCALIBUR PRO STERILE 25MM E35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE25PRO45	EXCALIBUR PRO STERILE 25MM E45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE31APR01	EXCALIBUR PRO STERILE 31MM E20-E45 (BLISTER 4 FILES)	1 blister	48,42 €	22	33,90 €
ZAZRE31PRO20	EXCALIBUR PRO STERILE 31MM E20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE31PRO25	EXCALIBUR PRO STERILE 31MM E25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE31PRO35	EXCALIBUR PRO STERILE 31MM E35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZRE31PRO45	EXCALIBUR PRO STERILE 31MM E45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	64,13 €	22	44,90 €
ZAZGE211502	EXCALIBUR GLIDER STERILE FILES 21MM (BLISTER DA 3 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	34,59 €	22	23,00 €
ZAZGE251502	EXCALIBUR GLIDER STERILE FILES 25MM (BLISTER DA 3 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	34,59 €	22	23,00 €
ZAZGE311502	EXCALIBUR GLIDER STERILE FILES 31MM (BLISTER DA 3 FILES) - IN ESAURIMENTO	1 blister	34,59 €	22	23,00 €
ZAZGE21PRO2	EXCALIBUR GLIDER PRO STERILE 21MM (BLISTER DA 3 FILES)	1 blister	37,43 €	22	24,90 €
ZAZGE25PRO2	EXCALIBUR GLIDER PRO STERILE 25MM (BLISTER DA 3 FILES)	1 blister	37,43 €	22	24,90 €
ZAZGE31PRO2	EXCALIBUR GLIDER PRO STERILE 31MM (BLISTER DA 3 FILES)	1 blister	37,43 €	22	24,90 €

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
PUNTE DI GUTTAPERCA					
ZAGP-144	GUTTAPERCA BLUESHAPER Z3 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-145	GUTTAPERCA BLUESHAPER Z4 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-146	GUTTAPERCA BLUESHAPER Z5 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-147	GUTTAPERCA BLUESHAPER Z6 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-148	GUTTAPERCA BLUESHAPER Z7 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZSSGP00ZS1	PUNTE DI GUTTAPERCA SLIMSHAPER ZS1 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZSSGP00ZS2	PUNTE DI GUTTAPERCA SLIMSHAPER ZS2 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZSSGP00ZS3	PUNTE DI GUTTAPERCA SLIMSHAPER ZS3 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZREGP00E20	PUNTE DI GUTTAPERCA EXCALIBUR E20 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZREGP00E25	PUNTE DI GUTTAPERCA EXCALIBUR E25 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZREGP00E35	PUNTE DI GUTTAPERCA EXCALIBUR E35 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAZREGP00E45	PUNTE DI GUTTAPERCA EXCALIBUR E45 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP430	PUNTE DI GUTTAPERCA APICALSHAPER Z30 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €



LISTINO PREZZI 2026



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAGP435	PUNTE DI GUTTAPERCA APICALSHAPER Z35 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP440	PUNTE DI GUTTAPERCA APICALSHAPER Z40 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP450	PUNTE DI GUTTAPERCA APICALSHAPER Z50 (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-24	GUTTAPERCA ZARC .02/15 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-25	GUTTAPERCA ZARC .02/20 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-26	GUTTAPERCA ZARC .02/25 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-27	GUTTAPERCA ZARC .02/30 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-28	GUTTAPERCA ZARC .02/35 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-29	GUTTAPERCA ZARC .02/40 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-48	GUTTAPERCA ZARC .04/25 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-49	GUTTAPERCA ZARC .04/30 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-78	GUTTAPERCA ZARC .06/25 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-79	GUTTAPERCA ZARC .06/30 (BOX 60 PZ)	1 box	22,00 €	4	15,40 €
ZAGP-120	GUTTAPERCA ZARC FINE (BOX 100 PZ)	1 box	14,29 €	4	10,00 €
ZAGP-121	GUTTAPERCA ZARC X-FINE (BOX 100 PZ)	1 box	14,29 €	4	10,00 €
ZAGP-701	GUTTAPERCA Z-FIT N (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
ZAGP-702	GUTTAPERCA Z-FIT W (BOX 60 PZ)	1 box	34,14 €	4	23,90 €
PUNTE DI CARTA					
ZAPP-144	PUNTE DI CARTA - BLUESHAPER Z3 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-145	PUNTE DI CARTA - BLUESHAPER Z4 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-146	PUNTE DI CARTA - BLUESHAPER Z5 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-147	PUNTE DI CARTA - BLUESHAPER Z6 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-148	PUNTE DI CARTA - BLUESHAPER Z7 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZSSPP00ZS2	PUNTE DI CARTA - SLIMSHAPER ZS2 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZSSPP00ZS3	PUNTE DI CARTA - SLIMSHAPER ZS3 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-430	PUNTE DI CARTA - APICALSHAPER Z30 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-435	PUNTE DI CARTA - APICALSHAPER Z35 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-440	PUNTE DI CARTA - APICALSHAPER Z40 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAPP-450	PUNTE DI CARTA - APICALSHAPER Z50 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E20	PUNTE DI CARTA - EXCALIBUR E20 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E25	PUNTE DI CARTA - EXCALIBUR E25 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E35	PUNTE DI CARTA - EXCALIBUR E35 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €
ZAZREPP00E45	PUNTE DI CARTA - EXCALIBUR E45 (BOX 100 PZ)	1 box	27,43 €	22	19,20 €

I prezzi indicati sono IVA esclusa

LISTINO PREZZI 2026



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAPP-24	PUNTE DI CARTA - ZARC .02/15 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-25	PUNTE DI CARTA - ZARC .02/20 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-26	PUNTE DI CARTA - ZARC .02/25 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-27	PUNTE DI CARTA - ZARC .02/30 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-28	PUNTE DI CARTA - ZARC .02/35 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-29	PUNTE DI CARTA - ZARC .02/40 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-48	PUNTE DI CARTA - ZARC .04/25 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-49	PUNTE DI CARTA - ZARC .04/30 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-78	PUNTE DI CARTA - ZARC .06/25 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-79	PUNTE DI CARTA - ZARC .06/30 (BOX 100 PZ)	1 box	20,71 €	22	14,50 €
ZAPP-120	PUNTE DI CARTA - ZARC FINE (BOX 180 PZ)	1 box	11,86 €	22	8,30 €
ZAPP-121	PUNTE DI CARTA - ZARC X-FINE (BOX 180 PZ)	1 box	11,86 €	22	8,30 €
ZASCPP-701	Z-FIT NARROW PUNTE DI CARTA STERILI SOTTILI (BLISTER 180 PZ) - CONICITA' PROGRESSIVA	1 box	49,08 €	22	29,50 €
ZASCPP-702	Z-FIT WIDE PUNTE DI CARTA STERILI AMPIE (BLISTER 180 PZ) - CONICITA' PROGRESSIVA	1 box	59,52 €	22	36,25 €
ZASCPP-120	PUNTE DI CARTA STERILI - ZARC FINE (BLISTER 180 PZ)	1 box	35,88 €	22	19,90 €
ZASCPP-121	PUNTE DI CARTA STERILI - ZARC X-FINE (BLISTER 180 PZ)	1 box	35,88 €	22	19,90 €
ZASCPP-144	PUNTE DI CARTA STERILI - BLUESHAPER Z3 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-145	PUNTE DI CARTA STERILI - BLUESHAPER Z4 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-146	PUNTE DI CARTA STERILI - BLUESHAPER Z5 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-147	PUNTE DI CARTA STERILI - BLUESHAPER Z6 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-148	PUNTE DI CARTA STERILI - BLUESHAPER Z7 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-48	PUNTE DI CARTA STERILI - ZARC .04/25 (BLISTER 180 PZ)	1 box	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-49	PUNTE DI CARTA STERILI - ZARC .04/30 (BLISTER 180 PZ)	1 box	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-78	PUNTE DI CARTA STERILI - ZARC .06/25 (BLISTER 180 PZ)	1 box	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-79	PUNTE DI CARTA STERILI - ZARC .06/30 (BLISTER 180 PZ)	1 box	44,52 €	22	26,90 €
ZASCPP-320	PUNTE DI CARTA STERILI - EXCALIBUR E20 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-325	PUNTE DI CARTA STERILI - EXCALIBUR E25 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-335	PUNTE DI CARTA STERILI - EXCALIBUR E35 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-345	PUNTE DI CARTA STERILI - EXCALIBUR E45 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-201	PUNTE DI CARTA STERILI - SLIMSHAPER ZS1 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-202	PUNTE DI CARTA STERILI - SLIMSHAPER ZS2 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-203	PUNTE DI CARTA STERILI - SLIMSHAPER ZS3 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-430	PUNTE DI CARTA STERILI - APICALSHAPER Z30 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZASCPP-435	PUNTE DI CARTA STERILI - APICALSHAPER Z35 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-440	PUNTE DI CARTA STERILI - APICALSHAPER Z40 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
ZASCPP-450	PUNTE DI CARTA STERILI - APICALSHAPER Z50 (BLISTER 180 PZ)	1 box	53,99 €	22	32,90 €
FILE MANUALI					
ZAZBSHF16PROZX	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 16MM (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO1	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z1 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO2	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z2 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO3	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z3 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO4	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z4 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO5	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO6	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z6 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25ZPRO7	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z7 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAZBSHF25APRO4	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM Z1-Z4 (BLISTER DA 4 FILES)	1 blister	42,71 €	22	29,90 €
ZAZBSHF25APROS	BLUESHAPER PRO MANUALE STERILE 25MM ZXS-Z5 (BLISTER DA 6 FILES)	1 blister	57,00 €	22	39,90 €
ZAUDMS2002	Z MICRO-SHAPER .02/20 (BOX DA 3 PZ)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMS2502	Z MICRO-SHAPER .02/25 (BOX DA 3 PZ)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMS3002	Z MICRO-SHAPER .02/30 (BOX DA 3 PZ)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO1004	Z MICRO-OPENER .04/10 (BOX DA 3 PZ)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO1504	Z MICRO-OPENER .04/15 (BOX DA 3 PZ)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAUDMO2004	Z MICRO-OPENER .04/20 (BOX DA 3 PZ)	1 box	46,29 €	22	32,40 €
ZAZKFILE2106	K FILE 21MM 06 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2108	K FILE 21MM 08 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2110	K FILE 21MM 10 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2115	K FILE 21MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2120	K FILE 21MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2125	K FILE 21MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2130	K FILE 21MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2135	K FILE 21MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2140	K FILE 21MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2145	K FILE 21MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €

LISTINO PREZZI 2026



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAZKF21ASST1	K FILE ASSORTED 21MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF21ASST2	K FILE ASSORTED 21MM 45-80 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2506	K FILE 25MM 06 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2508	K FILE 25MM 08 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2510	K FILE 25MM 10 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2515	K FILE 25MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2520	K FILE 25MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2525	K FILE 25MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2530	K FILE 25MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2535	K FILE 25MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2540	K FILE 25MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE2545	K FILE 25MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF25ASST1	K FILE ASSORTED 25MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF25ASST2	K FILE ASSORTED 25MM 45-80 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3106	K FILE 31MM 06 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3108	K FILE 31MM 08 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3110	K FILE 31MM 10 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3115	K FILE 31MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3120	K FILE 31MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3125	K FILE 31MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3130	K FILE 31MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3135	K FILE 31MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3140	K FILE 31MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFILE3145	K FILE 31MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF31ASST1	K FILE ASSORTED 31MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKF31ASST2	K FILE ASSORTED 31MM 45-80 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2108	HEDSTRÖM STERILE 21MM 08 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2110	HEDSTRÖM STERILE 21MM 10 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2115	HEDSTRÖM STERILE 21MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2120	HEDSTRÖM STERILE 21MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2125	HEDSTRÖM STERILE 21MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2130	HEDSTRÖM STERILE 21MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2135	HEDSTRÖM STERILE 21MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2140	HEDSTRÖM STERILE 21MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €

LISTINO PREZZI 2026



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAZHEDST2145	HEDSTRÖM STERILE 21MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD21ASST1	HEDSTRÖM STERILE ASSORTED 21MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD21ASST2	HEDSTRÖM STERILE ASSORTED 21MM 45-80 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2508	HEDSTRÖM STERILE 25MM 08 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2510	HEDSTRÖM STERILE 25MM 10 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2515	HEDSTRÖM STERILE 25MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2520	HEDSTRÖM STERILE 25MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2525	HEDSTRÖM STERILE 25MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2530	HEDSTRÖM STERILE 25MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2535	HEDSTRÖM STERILE 25MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2540	HEDSTRÖM STERILE 25MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST2545	HEDSTRÖM STERILE 25MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD25ASST1	HEDSTRÖM STERILE ASSORTED 25MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD25ASST2	HEDSTRÖM STERILE ASSORTED 25MM 45-80 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3108	HEDSTRÖM STERILE 31MM 08 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3110	HEDSTRÖM STERILE 31MM 10 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3115	HEDSTRÖM STERILE 31MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3120	HEDSTRÖM STERILE 31MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3125	HEDSTRÖM STERILE 31MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3130	HEDSTRÖM STERILE 31MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3135	HEDSTRÖM STERILE 31MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3140	HEDSTRÖM STERILE 31MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHEDST3145	HEDSTRÖM STERILE 31MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD31ASST1	HEDSTRÖM STERILE ASSORTED 31MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZHD31ASST2	HEDSTRÖM STERILE ASSORTED 31MM 45-80 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	9,66 €	22	6,85 €
ZAZKFLEX2115	K FLEX 21MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2120	K FLEX 21MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2125	K FLEX 21MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2130	K FLEX 21MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2135	K FLEX 21MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2140	K FLEX 21MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2145	K FLEX 21MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKX21ASST1	K FLEX ASSORTED 21MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2515	K FLEX 25MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €

I prezzi indicati sono IVA esclusa

LISTINO PREZZI 2026



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAZKFLEX2520	K FLEX 25MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2525	K FLEX 25MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2530	K FLEX 25MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2535	K FLEX 25MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2540	K FLEX 25MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX2545	K FLEX 25MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKX25ASST1	K FLEX ASSORTED 25MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3115	K FLEX 31MM 15 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3120	K FLEX 31MM 20 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3125	K FLEX 31MM 25 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3130	K FLEX 31MM 30 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3135	K FLEX 31MM 35 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3140	K FLEX 31MM 40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKFLEX3145	K FLEX 31MM 45 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZKX31ASST1	K FLEX ASSORTED 31MM 15-40 (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2106	C+ FILE 21 MM 06 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2108	C+ FILE 21 MM 08 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2110	C+ FILE 21 MM 10 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2115	C+ FILE 21 MM 15 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2506	C+ FILE 25 MM 06 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2508	C+ FILE 25 MM 08 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2510	C+ FILE 25 MM 10 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFILE2515	C+ FILE 25 MM 15 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
ZAZCFE3106	C+ FILE 31 MM 06 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFE3108	C+ FILE 31 MM 08 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFE3110	C+ FILE 31 MM 10 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
ZAZCFE3115	C+ FILE 31 MM 15 ZARC (BLISTER 6 FILES)	1 blister	15,35 €	22	10,75 €
Strumenti e accessori					
ZAUDPL357001	Z-PLUGGER 35/70 (BOX 1 PZ)	1 box	65,84 €	22	43,79 €
ZAUDPL408001	Z-PLUGGER 40/80 (BOX 1 PZ)	1 box	65,84 €	22	43,79 €
ZAUDPL5010001	Z-PLUGGER 50/100 (BOX 1 PZ)	1 box	65,84 €	22	43,79 €
ZAUDPL6012001	Z-PLUGGER 60/120 (BOX 1 PZ)	1 box	65,84 €	22	43,79 €
ZAZGR	Z-GAUGE RIGHELLO	1 pz	39,71 €	22	27,80 €
ZAZRL	Z-RIGHELLO	1 pz	9,93 €	22	6,95 €
ZAZEB	ENDO-BLOCK RIGHELLO	1 pz	27,86 €	22	19,50 €
ZAZSTANDP	FILE ORGANIZER E RIGHELLO AUTOCLAVABILE - ZARC PINK	1 pz	8,43 €	22	5,90 €
ZAZSTANDY	FILE ORGANIZER E RIGHELLO AUTOCLAVABILE - ZARC YELLOW	1 pz	8,43 €	22	5,90 €
ZAZSTANDB	FILE ORGANIZER E RIGHELLO AUTOCLAVABILE - ZARC BLUE	1 pz	8,43 €	22	5,90 €
ZAUDIN3022050	Z-RINSE 30GA 22MM (BOX 50 PZ)	1 box	73,10 €	22	48,62 €
ZAUDIN3026050	Z-RINSE 30GA 26MM (BOX 50 PZ)	1 box	73,10 €	22	48,62 €
ZAZCLEAN	Z-CLEAN	1 pz	29,71 €	22	20,80 €
ZAZSPONGE	Z-CLEAN SPUGNE (50 PZ)	1 box	74,36 €	22	52,00 €
ZAZPY	PETALI GIALLI (50 PZ)	1 box	17,86 €	22	12,50 €



LISTINO PREZZI 2026



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
K03249	SONDA ENDO DG 16N EXTRA FINE TRINOVO PEEK NERO	conf. da 1 pz	73,04 €	22	59,00 €
K04095	PINZA ENDO CON BLOCCO EPL 1	conf. da 1 pz	48,27 €	22	39,00 €
K04337	SPECCHIETTO N. 4 INGRANDENTE	conf. da 12 pz	47,19 €	22	38,00 €
K04338	SPECCHIETTO N. 5 INGRANDENTE	conf. da 12 pz	47,19 €	22	38,00 €
K04339	SPECCHIETTO N. 4 PIATTO	conf. da 12 pz	36,02 €	22	29,00 €
K04339-CS	SPECCHIETTO N. 4 PIATTO CON FILETTATURA CONICA	conf. da 12 pz	94,03 €	22	76,00 €
K04340	SPECCHIETTO N. 5 PIATTO	conf. da 12 pz	36,02 €	22	29,00 €
K06083	SPECCHIETTO N. 5 PIATTO CON FILETTATURA CONICA	conf. da 12 pz	94,03 €	22	76,00 €
K04515	SPECCHIETTO RODIATO N. 4	conf. da 12 pz	69,89 €	22	53,90 €
K04516	SPECCHIETTO RODIATO N. 5	conf. da 12 pz	69,89 €	22	53,90 €
K05597	SPECCHIETTO RODIATO DOPPIO N. 4 - 6 PZ	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K05597-CS	SPECCHIETTO RODIO DOPPIO N.4 FIL. CONICA-6PZ	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K06699	SONDA DOPPIA IN ACCIAIO DG 16 MANICO STANDARD	conf. da 1 pz	31,07 €	22	25,00 €
K07532	PLUGGER MISURA 0,6 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07533	PLUGGER MISURA 0,8 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07534	PLUGGER MISURA 1,0 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07535	PLUGGER MISURA 1,2 - TRINOVO	conf. da 1 pz	39,67 €	22	32,00 €
K07536	SPREADER MISURA 20 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K07537	SPREADER MISURA 30 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K07538	SPREADER MISURA 40 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K07539	SPREADER MISURA 50 - TRINOVO	conf. da 1 pz	38,34 €	22	31,00 €
K08409	PLUGGER ENDO 0.40/0.55 MM TRINOVO PEEK NERO	conf. da 1 pz	75,43 €	22	61,00 €
K08422	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA YOSHI 26MM EGPR-L/R	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08423	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA YOSHI 26 MM EGPR-U/D	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €

LISTINO PREZZI 2026



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
K08424	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA YOSHI 18 MM EGPR-L/R	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08425	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA YOSHI 18 MM EGPR-U/D	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K08426	STRUMENTO PER RIMOZ. GUTTA YOSHI 18/26 MM, DIAMANTE	conf. da 1 pz	263,49 €	22	210,90 €
K09200	SONDA ENDO DG 16 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09201	SONDA ENDO KX1, DITTA ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K08451	SONDA KX1 DITTA	conf. da 1 pz	68,65 €	22	55,80 €
K09202	SONDA ENDO KX2, ANGOLATA ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09203	MICRO PLUGGER D-1 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09204	MICRO PLUGGER D-2 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	66,90 €
K09205	SPREADER 20/30 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	92,47 €	22	73,90 €
K09206	SPREADER 40/50 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	92,47 €	22	73,90 €
K09207	PLUGGER 0,6/0,8 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	85,26 €	22	68,90 €
K09208	PLUGGER 1,0/1,2 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	85,26 €	22	68,90 €
K09212	SONDA PARODONTALE CP12/CP15 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	94,08 €	22	76,00 €
K09213	SPATOLA HEIDEMANN FIG. 1 ENDOBLACK	conf. da 1 pz	92,91 €	22	75,00 €
K09214	SONDA ENDO 17/17L, MODIFICATA ENDOBLACK	conf. da 1 pz	82,78 €	22	67,00 €
K09218	IMPUGNATURA PER SPECCHIETTO SINGOLO ENDOBLACK	conf. da 1 pz	67,24 €	22	54,00 €
K09218-DE	IMPUGNATURA PER SPECCHIETTO DOPPIO ENDOBLACK	conf. da 1 pz	78,95 €	22	64,00 €
K09219	SPATOLA CON RIGHELLO ENDO ENDOBLACK	conf. da 1 pz	102,14 €	22	82,00 €
K09575	SPECCHIETTO RODIATO DOPPIO N. 5	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K09575-CS	SPECCHIETTO RODIATO DOPPIO N. 5 FILETTATURA CONICA	conf. da 6 pz	114,80 €	22	92,00 €
K04515-CC	SPECCHIETTO ENDOBLACK N.4 RODIO	conf. da 12 pz	246,02 €	22	196,90 €
K04516-CC	SPECCHIETTO ENDOBLACK N.5 RODIO	conf. da 12 pz	246,02 €	22	196,90 €
K06412-CC	MICRO SPECCHIETTO DIAM. 3MM RODIO ENDOBLACK - 1 PZ	conf. da 1 pz	184,29 €	22	147,90 €

I prezzi indicati sono IVA esclusa

LISTINO PREZZI 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
K06413-CC	MICRO SPECCHIETTO DIAM. 5MM RODIO ENDOBLACK - 1 PZ	conf. da 1 pz	184,29 €	22	147,90 €
K06414-CC	MICRO SPECCHIETTO RODIO 3X6 MM ENDOBLACK - 1 PZ	conf. da 1 pz	184,29 €	22	147,90 €
K08395	MINI SPECCHIETTO RODIATO DIAM. 10MM	conf. da 1 pz	43,70 €	22	35,00 €
K08396	MINI SPECCHIETTO RODIATO DIAM. 12MM	conf. da 1 pz	43,70 €	22	35,00 €
K08397	MINI SPECCHIETTO RODIATO DIAM. 14MM	conf. da 1 pz	43,70 €	22	35,00 €
K08462	MICRO PLUGGER PENN ENDO 3MM, DIAM. 0,6 MM	conf. da 1 pz	71,30 €	22	57,20 €
K08463	MICRO PLUGGER PENN ENDO 2,5MM, DIAM. 1,0 MM	conf. da 1 pz	71,30 €	22	57,20 €
K08307	SET DIAGNOSTICO DR.KIM	kit	583,52 €	22	468,00 €
K08308	SET PER SCOLLAMENTO DEL LEMBO DR.KIM	kit	766,69 €	22	615,00 €
K08309	PLUGGER SET DR.KIM	kit	548,09 €	22	439,50 €
K08310	SET MICRO SPECCHIETTI DR.KIM	kit	491,94 €	22	394,50 €
K08311	SET RETRATTORI DR.KIM	kit	503,09 €	22	403,50 €



LISTINO PREZZI 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
PAC9542SIVC	IVAC INTRO KIT ATTACCO SATELEC	kit	324,41 €	22	245,50 €
PAC9542EIVC	IVAC INTRO KIT ATTACCO EMS	kit	324,41 €	22	245,50 €
PAC954235G	IVAC CANNULE 0.35, 27 MM, VERDE (20 PZ)	box da 20 pz.	58,31 €	22	45,00 €
PAC954250Y	IVAC CANNULE 0.50, 27 MM, GIALLA (20 PZ)	box da 20 pz.	58,31 €	22	45,00 €
PAC9542LTA	IVAC TUBO LUNGO IN SILICONE E CONNETTORI (1 PZ)	1 pz.	26,16 €	22	21,00 €
PAC9542ST	IVAC TUBO CORTO IN SILICONE CON CONNETTORI (5 PZ)	box da 5 pz.	36,55 €	22	27,50 €
PAC9542ACT	IVAC CANNULA CAPILLARE ANGOLATA (10 PZ)	box da 10 pz.	26,16 €	22	21,00 €
PAC9542SC	IVAC INSERTO IN METALLO ATTACCO SATELEC (2 PZ)	2 pz.	87,54 €	22	67,00 €
PAC9542EC	IVAC INSERTO IN METALLO ATTACCO EMS (2 PZ)	2 pz.	87,54 €	22	67,00 €
PAC9542R	IVAC ANELLI (10 PZ)	box da 10 pz.	49,55 €	22	37,50 €



I prezzi indicati sono IVA esclusa

RIF.	DESCRIZIONE	ISO	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MAP SYSTEM KIT						
MAP20296_PP	MAP ONE SYSTEM KIT		1 pz.	539,54 €	22	420,00 €
MAP20288_PP	MAP VPT KIT		1 pz.	539,54 €	22	420,00 €
MAP20285_PP	INTRO KIT		1 pz.	943,21 €	22	758,00 €
MAP20286	UNIVERSAL KIT - in esaurimento		1 pz.	1.310,75 €	22	1.037,30 €
MAP20287_PP	KIT CHIRURGICO		1 pz.	1.628,49 €	22	1.302,00 €
MAP SYSTEM PUNTALI						
MAP20210-11-12	PUNTALE IN NITI A MEMORIA DI FORMA	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	304,04 €	22	243,00 €
MAP20220-21	PUNTALE CURVO CLASSIC	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso	1 pz.	259,30 €	22	207,10 €
MAP20225	PUNTALE SURGERY N° 0 - DX	Ø 090 giallo	1 pz.	268,33 €	22	211,60 €
MAP20226	PUNTALE SURGERY N° 0 - SX	Ø 090 giallo	1 pz.	268,33 €	22	211,60 €
MAP20227	PUNTALE SURGERY N° 1 - DX	Ø 110 rosso	1 pz.	268,33 €	22	211,60 €
MAP20228	PUNTALE SURGERY N° 1 - SX	Ø 110 rosso	1 pz.	268,33 €	22	211,60 €
MAP20263-64-65	PUNTALE HOOKED (ad Uncino)	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	1 pz.	268,33 €	22	211,60 €
MAP20218_PP	MAP VPT PUNTALE N° 1	Ø2,3mm bianco	1 pz.	298,11 €	22	238,00 €
MAP20219_PP	MAP VPT PUNTALE N° 2	Ø3,4mm viola	1 pz.	298,11 €	22	238,00 €
MAP SYSTEM - PULIZIA						
MAP20289	MAP VPT CLEANING BRUSH		1 pz.	12,50 €	22	9,90 €
MAP20249	CLEANYFLOSS PER MAP SYSTEM		box 30 pz.	16,48 €	22	13,00 €
MAP SYSTEM - RICAMBI						
MAP20200-01-02	PISTONE DI RICAMBIO	Ø 090 giallo, Ø 110 rosso, Ø 130 blu	box 16 pz.	31,27 €	22	24,90 €
MAP20203	MAP VPT PISTONE IN PLASTICA	bianco	box 16 pz.	31,27 €	22	24,90 €
MAP20204	MAP VPT PISTONE IN PLASTICA	viola	box 16 pz.	31,27 €	22	24,90 €
CEMENTO MTA						
MAP20190	PD® MTA Bianco (4 bustine da 140mg + acqua pura 3ml)		1 conf.	58,85 €	4	46,40 €
PUNTALI IRRIFLEX						
MAP21401_PP	IrriFlex - puntali per irrigazione + 50 stopper endodontici		Box 40 pz + 50 stopper	90,05 €	22	68,80 €
MAP21401	IrriFlex - puntali per irrigazione		Box 40 pz	86,23 €	22	66,00 €
MAP21400	IrriFlex - puntali per irrigazione		Box 20 pz	50,06 €	22	41,00 €

RIF.	DESCRIZIONE	ISO	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
SIRINGHE SENZA AGO						
MAP21431	SIRINGHE IRRIGANCE 5ML - COLORI ASSORTITI - 30 PZ		box 30 pz	10,85 €	22	8,60 €
MAP21422	SIRINGHE IRRIGANCE 3ML - ROSSO - 50 PZ		box 50 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21423	SIRINGHE IRRIGANCE 3ML - BIANCO - 50 PZ		box 50 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21424	SIRINGHE IRRIGANCE 3ML - NERO - 50 PZ		box 50 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21425	SIRINGHE IRRIGANCE 5ML - ROSSO - 50 PZ		box 50 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21426	SIRINGHE IRRIGANCE 5ML - BIANCO - 50 PZ		box 50 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21427	SIRINGHE IRRIGANCE 5ML - NERO - 50 PZ		box 50 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21428	SIRINGHE IRRIGANCE 10ML - ROSSO - 30 PZ		box 30 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21429	SIRINGHE IRRIGANCE 10ML - BIANCO - 30 PZ		box 30 pz	16,98 €	22	13,50 €
MAP21430	SIRINGHE IRRIGANCE 10ML - NERO - 30 PZ		box 30 pz	16,98 €	22	13,50 €
EUGENATE DESOBTURATOR - EDTA 17% - OPACAL						
MAP11555	Eugenate Desobturator- solvente flacone 15 ml		1 pz.	23,25 €	22	19,60 €
MAP11565	EDTA 17% - flacone 15 ml		1 pz.	30,46 €	22	25,80 €
MAP11569	EDTA 17% - flacone 100 ml		1 pz.	42,00 €	22	34,80 €
MAP11020	Opacal Kit composto da Siringa da 3 ml + 10 puntali per applicazione (monouso)		1 pz.	40,23 €	22	33,50 €



RIF.	DESCRIZIONE	ISO	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MAP11022	Opacal Refill puntali per applicazione		10 puntali	13,88 €	22	12,60 €
PALLINE DI COTONE E PIPETTE						
MAP33251	Palline di cotone N°1		box 630 pz	22,80 €	22	18,90 €
MAP33252	Palline di cotone N°2		box 1470 pz	23,45 €	22	19,50 €
MAP33253	Palline di cotone N°3		box 2.220 pz	31,05 €	22	26,40 €
MAP33254	Palline di cotone N°4		box 4.050 pz	41,23 €	22	34,70 €
MAP11754	Pipette di plastica 0,3ml		box 25 pz	95,91 €	22	72,90 €
MAP11750	Pipette di plastica 0,3ml		box 5 pz	26,68 €	22	20,90 €
N5 IPOCLORITO DI SODIO AL 5%						
ITD0000184 I	N5 G-Clor - Sodio Ipoclorito al 5% in cloro attivo		flacone 250ml	17,73 €	22	15,20 €



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
CMSSCR6/20	SOFT-CORE OTTURATORE 20 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/25	SOFT-CORE OTTURATORE 25 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/30	SOFT-CORE OTTURATORE 30 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/35	SOFT-CORE OTTURATORE 35 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/40	SOFT-CORE OTTURATORE 40 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/45	SOFT-CORE OTTURATORE 45 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/50	SOFT-CORE OTTURATORE 50 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/55	SOFT-CORE OTTURATORE 55 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSCR6/60	SOFT-CORE OTTURATORE 60 (CONF. 6 PZ)	6 pz	29,25 €	4	20,50 €
CMSSSV6/20	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 20 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/25	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 25 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/30	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 30 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/35	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 35 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/40	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 40 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/45	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 45 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/50	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 50 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/55	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 55 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSSV6/60	SOFT-CORE SIZE VERIFIER 60 (CONF. 6 PZ)	6 pz	20,74 €	22	12,10 €
CMSSCDTINT/ EU/R20-30	SOFT-CORE INTRO KIT COMPOSTO DA: 1 FORNETTO, 3 CONF. OTTURATORI (da 6 pz) 020, 025, 030 + 1 CONF. ASS.TA DI VERIFICATORI 020, 025, 030	kit	487,06 €	22	282,50 €
CMSSCDTO/EU	CMS SOFT-CORE FORNETTO	1 pz	417,75 €	22	242,00 €



I prezzi indicati sono IVA esclusa

LISTINO PREZZI 2026



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
AVANSRS	NEOSEALER FLO REFILL SIRINGA 2,2 GR	kit	174,74 €	4	113,50 €
AVANSFK	NEOSEALER FLO 2,2 GR KIT (CON 20 AGHI FLEX FLO TIPS)	kit	218,43 €	4	142,50 €
AVANPIK	NEOPUTTY - 0.5 GR KIT	kit	121,19 €	4	79,00 €
AVANPPK	NEOPUTTY - 1.2 GR KIT	kit	242,55 €	4	157,50 €
AVN2100	NEOMTA 2 - 1,0 GR KIT	kit	173,14 €	4	113,00 €
AVN2250	NEOMTA 2 - 2,5 GR KIT	kit	299,18 €	4	194,50 €
AVFFT20	NEOSEALER FLEX FLO TIPS (20 PZ) - AGHI PER APPLICARE IL CEMENTO BIOCERAMICO	1 box 20 pz	67,79 €	4	44,00 €
AVFFT40	NEOSEALER FLEX FLO TIPS (40 PZ) - AGHI PER APPLICARE IL CEMENTO BIOCERAMICO	1 box 40 pz	122,80 €	4	80,00 €
AVBFT20	NEOSEALER FLO BASIC FLEX TIPS (20 PZ) - AGHI PER APPLICARE IL CEMENTO BIOCERAMICO	1 box 20 pz	41,91 €	4	28,00 €
AVBFT40	NEOSEALER FLO BASIC FLEX TIPS (40 PZ) - AGHI PER APPLICARE IL CEMENTO BIOCERAMICO	1 box 40 pz	64,56 €	4	42,00 €
AVSPA100	SPATOLA PER MISCELAZIONE	1 pz	16,99 €	4	11,20 €
AVSPA200	LASTRA DI VETRO	1 pz	24,11 €	4	15,70 €



LISTINO PREZZI 2026



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
BONBMMAL101	IROOT PRO - IN ESAURIMENTO	1 conf.	1.227,34 €	22	859,00 €
BONWMMOT101	ENDO WISE - MICROMOTORE ENDODONTICO	1 conf.	1.067,00 €	22	772,00 €
BONSRTA3000	ENDO WISE PLUS - MICROMOTORE ENDODONTICO CON RILEVATORE APICALE INTEGRATO	1 conf.	1.284,41 €	22	926,00 €
BONPBM 000101110001	PEDALE WIRELESS PER MOTORE ENDODONTICO	1 pz	192,58 €	22	150,00 €
BONWMAPL101	WISPEX - RILEVATORE APICALE	1 conf.	441,62 €	22	319,00 €
BONBMAPL101	IROOT APEX - RILEVATORE APICALE	1 conf.	531,12 €	22	381,00 €
BONBMCA1601	TESTINA CONTRANGOLO (16:1)	1 pz	360,00 €	22	222,00 €
BONSRCW2000	ACTOR I PRO - ATTIVATORE DI IRRIGANTE A ULTRASUONI	1 conf.	533,33 €	22	387,00 €
BONBMWT0001	ACTOR I PRO AGO IRRIGAZIONE 20/02 21MM (E96)	1 pz	22,83 €	22	16,60 €
BONBMWT0002	ACTOR I PRO AGO IRRIGAZIONE 25/02 18 MM (E98)	1 pz	22,83 €	22	16,60 €
BONSRCF1000	EFILLER - SISTEMA DI OTTURAZIONE BACKFILL	1 conf.	711,11 €	22	514,00 €
BONBMFN0001	E-FILLER AGO 23G 28MM (4 PZ)	4 pz	170,67 €	22	124,00 €
BONBMFN0002	E-FILLER AGO 25G 24MM (4 PZ)	4 pz	170,67 €	22	124,00 €
BONDUDGO 000025000	GUTTAPERCA EFILLER 2.5MM (BOX 100 PZ)	1 box da 100 pz	88,19 €	4	64,00 €
BONSRCF1000	EHEATER - SISTEMA DI OTTURAZIONE DOWNPACK	1 conf.	711,11 €	22	514,00 €
BONBMHN0001	PLUGGER EHEATER 40/04 (4 PZ)	4 pz	170,67 €	22	124,00 €
BONBMHN0002	PLUGGER EHEATER 45/04 (4 PZ)	4 pz	170,67 €	22	124,00 €
BONBMHN0003	PLUGGER EHEATER 50/04 (4 PZ)	4 pz	170,67 €	22	124,00 €
BONBMHN0004	PLUGGER EHEATER 55/08 (4 PZ)	4 pz	170,67 €	22	124,00 €



I prezzi indicati sono IVA esclusa

LISTINO PREZZI 2026



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
DIGHE 6x6" (15x15cm)					
NIC144-0012	DIGA NIC TONE 6'X6' BLU SOTTILE 36 FOGLI	conf. da 36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0022	DIGA NIC TONE 6'X6' BLU MEDIA 36 FOGLI	conf. da 36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0032	DIGA NIC TONE 6'X6' BLU SPESSA 36 FOGLI	conf. da 36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0039	DIGA NIC TONE 6'X6' BLU EXTRA SPESSA 36 FOGLI	conf. da 36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0013	DIGA NIC TONE 6'X6' VERDE SOTTILE 36 FOGLI	conf. da 36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0023	DIGA NIC TONE 6'X6' VERDE MEDIA 36 FOGLI	conf. da 36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0033	DIGA NIC TONE 6'X6' VERDE SPESSA 36 FOGLI	conf. da 36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0040	DIGA NIC TONE 6'X6' NERA SOTTILE 36 FOGLI	conf. da 36 pz	28,31 €	22	20,90 €
NIC144-0038	DIGA NIC TONE 6'X6' NERA MEDIA 36 FOGLI	conf. da 36 pz	28,31 €	22	20,90 €
NIC144-0037	DIGA NIC TONE 6'X6' NERA SPESSA 36 FOGLI	conf. da 36 pz	28,31 €	22	20,90 €
DIGA SINTETICA					
NIC144-0404	DIGA NIC TONE SINTETICA 6'X6' BLU MEDIA 15 FOGLI	conf. da 15 pz	34,23 €	22	25,25 €
DIGHE PER PEDODONZIA 5x5" (12x12cm)					
NIC144-0010	DIGA NIC TONE 5'X5' BLU SOTTILE 36 FOGLI	conf. da 36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0020	DIGA NIC TONE 5'X5' BLU MEDIA 36 FOGLI	conf. da 36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0030	DIGA NIC TONE 5'X5' BLU SPESSA 36 FOGLI	conf. da 36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0011	DIGA NIC TONE 5'X5' VERDE SOTTILE 36 FOGLI	conf. da 36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0021	DIGA NIC TONE 5'X5' VERDE MEDIA 36 FOGLI	conf. da 36 pz	26,97 €	22	19,90 €
NIC144-0031	DIGA NIC TONE 5'X5' VERDE SPESSA 36 FOGLI	conf. da 36 pz	28,32 €	22	20,90 €



LISTINO PREZZI 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
KIT					
MD1675/10	KIT PER DIGA FINITURA ACCIAIO composto da: 10 uncini, 1 pinza per ganci, 1 pinza foradiga, 3 archetti, 1 piastra porta uncini e 1 cassetta per sterilizzazione)	kit	624,07 €	22	486,50 €
PINZE FORADIGA					
MD5550	PINZA FORADIGA IVORY	1 pz	141,36 €	22	109,55 €
MD5560/1	PINZA FORADIGA AINSWORTH	1 pz	117,30 €	22	90,90 €
MD5560/2	PINZA FORADIGA AINSWORTH ZIGRINATO	1 pz	117,90 €	22	91,10 €
TELAI					
MD5552	TELAIO TENDI DIGA mm140	1 pz	25,65 €	22	20,70 €
MD5553	TELAIO TENDI DIGA mm110	1 pz	25,28 €	22	19,70 €
MD5554	TELAIO TENDI DIGA mm90	1 pz	24,95 €	22	19,70 €
PINZE PER UNCINI					
MD5551	PINZA PER UNCINI IVORY	1 pz	67,65 €	22	53,00 €
MD5570	PINZA PER UNCINI BREWER	1 pz	63,80 €	22	50,10 €
MD5580	PINZA PER UNCINI WASHINGTON	1 pz	63,80 €	22	50,10 €
MD5590	PINZA PER UNCINI WHITE	1 pz	63,80 €	22	50,10 €
UNCINI IN ACCIAIO					
MD5595/0	UNCINO PER DIGA N.0	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/00	UNCINO PER DIGA N.00	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/1	UNCINO PER DIGA N.1	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/1A	UNCINO PER DIGA N.1A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/2A	UNCINO PER DIGA N.2A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/3	UNCINO PER DIGA N.3	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/4	UNCINO PER DIGA N.4	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/5	UNCINO PER DIGA N.5	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/7	UNCINO PER DIGA N.7	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/8	UNCINO PER DIGA N.8	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/8A	UNCINO PER DIGA N.8A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/9	UNCINO PER DIGA N.9	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/12A	UNCINO PER DIGA N.12A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/13A	UNCINO PER DIGA N.13A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/14	UNCINO PER DIGA N.14	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/14A	UNCINO PER DIGA N.14A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €



I prezzi indicati sono IVA esclusa

LISTINO PREZZI 2026

RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
MD5595/18	UNCINO PER DIGA N.18	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/27	UNCINO PER DIGA N.27	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/28	UNCINO PER DIGA N.28	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/29	UNCINO PER DIGA N.29	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/56	UNCINO PER DIGA N.56	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/210	UNCINO PER DIGA N.210	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/212	UNCINO PER DIGA N.212	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
MD5595/W8A	UNCINO PER DIGA N.W8A	1 pz	23,35 €	22	18,70 €
UNCINI NERISSIMO					
MD5595/00.NE	UNCINO PER DIGA N.00 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/1A.NE	UNCINO PER DIGA N.1A NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/2A.NE	UNCINO PER DIGA N.2A NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/3.NE	UNCINO PER DIGA N.3 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/4.NE	UNCINO PER DIGA N.4 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/7.NE	UNCINO PER DIGA N.7 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/8.NE	UNCINO PER DIGA N.8 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/8A.NE	UNCINO PER DIGA N.8A NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/9.NE	UNCINO PER DIGA N.9 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/12A.NE	UNCINO PER DIGA N.12A NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/13A.NE	UNCINO PER DIGA N.13A NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/14.NE	UNCINO PER DIGA N.14 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/27.NE	UNCINO PER DIGA N.27 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/29.NE	UNCINO PER DIGA N.29 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/210.NE	UNCINO PER DIGA N.210 NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
MD5595/W8A.NE	UNCINO PER DIGA N.W8A NERO	1 pz	31,77 €	22	24,80 €
CONTENITORI					
MD5605	PIASTRA PORTA UNCINI IN ACCIAIO	1 pz	44,43 €	22	35,00 €
MD981/20	CASSETTA DI STERILIZZAZIONE VERDE (VUOTA)	1 pz	160,86 €	22	123,90 €



RIF.	DESCRIZIONE	CONF.	LISTINO	IVA %	PREZZO DI VENDITA
PRJT1515	ERGO STARTER KIT - BRACCIALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PULIZIA DEGLI STRUMENTI ENDODONTICI: <i>1x Bracciale Ergo, 3x spugna blu 3x spugna grigia, 2x protezioni acciaio</i>	kit	69,00 €	22	69,00 €
PRJT1508	ERGO REFILL SPUGNE (24 BIANCHE + 24 BLU)	conf. da 48 pz	42,00 €	22	42,00 €
PRJT0161	ERGO REFILL SPUGNE (44 BIANCHE)	conf. da 44 pz	39,00 €	22	39,00 €
PRJT2536	PLANO - ACCESSORIO PER ORGANIZZARE I MATERIALI ENDODONTICI	1 pz	69,00 €	22	69,00 €
PRJT0093	CREO KIT - BRACCIALE IN SILICONE PER CONSERVATIVA	1 pz	87,00 €	22	87,00 €
PRJJT123	ERGO STAND - ACCESSORIO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PULIZIA DEGLI STRUMENTI ENDODONTICI	1 pz	49,00 €	22	49,00 €
PRPDAM-AISI	PACDAM ACCIAIO INOSSIDABILE - TEMPLATE AUTOCLAVABILE PER BUCARE LA DIGA ODONTOIATRICA	1 pz	45,00 €	22	45,00 €
PRPDAM-PMMA-N	PACDAM PLEXYGlass NERO OPACO - TEMPLATE PER BUCARE LA DIGA ODONTOIATRICA	1 pz	29,00 €	22	29,00 €
PRPDAM-PMMA-G	PACDAM PLEXYGlass GIALLO FLUO - TEMPLATE PER BUCARE LA DIGA ODONTOIATRICA	1 pz	29,00 €	22	29,00 €
PRPDAM-PMMA-F	PACDAM PLEXYGlass FUCSIA FLUO - TEMPLATE PER BUCARE LA DIGA ODONTOIATRICA	1 pz	29,00 €	22	29,00 €
PRCU_SINGLE	CUADRA ARCO PER DIGA DENTALE (CONF. 1 PZ)	1 pz	49,00 €	22	49,00 €
PROLINE					
PROTRPAD	PROTRAIN SIMULATORE ENDODONTICO	kit	54,14 €	22	54,00 €

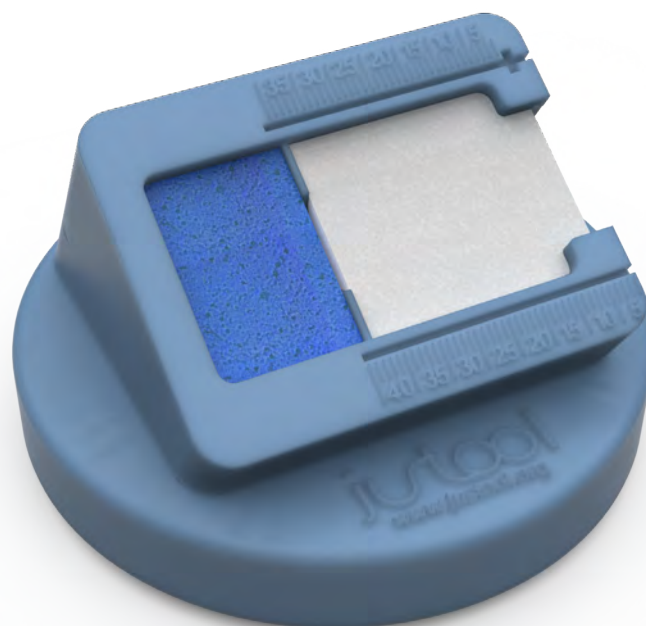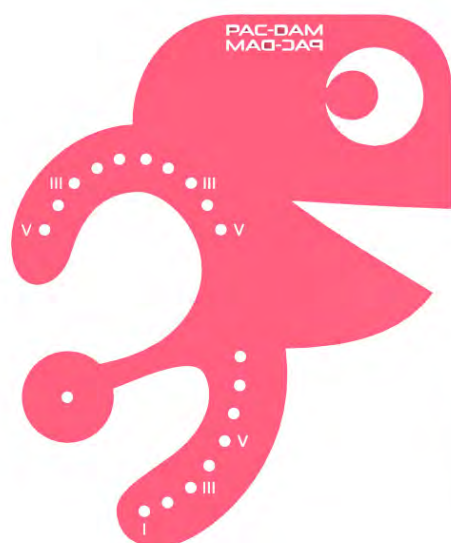

Gruppo Simit

