

Tubulitec Primer

Tubulitec Cavity Liner

Per la protezione della dentina e della polpa



Il **Tubulitec Primer** ed il **Tubulitec Liner** costituiscono un sistema combinato, utilizzabile con tutti gli abituali materiali d'otturazione, che permette di ricoprire con un sottilissimo doppio strato resinoso tutte le superfici dentinali esposte e quindi di chiudere anche gli imbocchi dei tubuli su di esse presenti.

Il **Tubulitec Primer** è fondamentalmente costituito da una resina naturale (shellac) disciolta in alcool, con l'aggiunta di cloruro di benzalconio.

Il **Tubulitec Primer** è idrofilo, compenetra la dentina asciugata e vi rimane aderente in strato sottilissimo (intorno al micron di spessore).

Il **Tubulitec Liner** contiene come costituenti principali polistirene e balsamo di copaiva disciolti in etilacetato; è idrofobo e va applicato dopo il Primer sul quale si stende in strato sottile.

La pellicola protettiva così ottenuta dalla duplice applicazione dei **Tubulitec Primer** e **Tubulitec Liner** fa sì che i liquidi orali ed i batteri che si infiltrano nella fessura che si crea attorno al materiale d'otturazione restino confinati nello spazio tra il Liner e l'otturazione e non possano penetrare nei tubuli dentinali, dando complicazioni quali sensibilità al freddo, danni pulpari ed anche carie secondaria.