



EUGENATE DESOBTURATOR

Soluzione per ammorbidire gli ossieugenolati e i materiali otturatori a base di Gutta Perca nel canale radicolare.

Composizione

Olio di arancio.

Proprietà

Eugenate Desobturator è una soluzione da utilizzare specificamente per il rammollimento e la successiva rimozione meccanica di materiali otturatori di tipo eugenato e a base di Gutta Perca dal canale radicolare.

Indicazioni

Disotturazione di otturazioni di tipo eugenato e di materiali a base di Gutta Perca dal canale radicolare.

Istruzioni per l'uso

- Dopo la pulizia meccanica della camera pulpare, introdurre una goccia di soluzione all'interno del canale radicolare con una pallina di cotone o una pipetta di plastica.
- Lasciare agire la soluzione per circa 1 minuto e poi procedere alla disotturazione con una broccia immersa nella soluzione. Ripetere l'operazione ogni volta che si avverte resistenza fino a quando il canale radicolare è libero fino all'apice.
- Sciacquare, pulire e asciugare accuratamente dopo la disotturazione e prima di inserire una nuova otturazione.

Avvertenze

Quando si utilizza questo prodotto, è necessario indossare guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione cutanea, consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con cautela con acqua dolce e pulita per 15 minuti, tenendo le palpebre aperte, e chiamare immediatamente un medico. In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua e consultare un medico. Tenere la persona esposta a riposo, non forzare il vomito. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota a uno qualsiasi di questi ingredienti.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente tra 5° C e 30° C, al riparo dalla luce diretta.

Confezione

Flacone da 15 ml

REF

11555



Per uso professionale odontoiatrico
Prodotto in Svizzera



Produits Dentaires SA

Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey
pd-dental.com . Switzerland