

Opacal

Elevato pH per la
medicazione
intermedia dei
canali radicolari



Opacal è una pasta di idrossido di calcio radiopaca, cremosa e pronta all'uso con un pH superiore a 12. Il rilascio della pasta nel canale radicolare è assicurato dalla punta di applicazione dedicata.



SMART PRODUCTS
FOR ENDO LOVERS


Opacal

Progettato per la medicazione intermedia dei canali radicolari con pH elevato (>12), elevata radiopacità (>3 mm alu) e consistenza cremosa. La sua composizione acquosa e il relativo rilascio ionico rapido (R.G. Fava & W.P. Saunders – Pasta di idrossido di calcio: classificazione e indicazioni cliniche) offre prestazioni in procedure con tempi di trattamento brevi. La consistenza della pasta pronta all'uso e l'offerta di punte di applicazione fini permette una comoda erogazione della pasta.


Composizione: di calcio 30%, solfato di bario 24%, eccipiente

Vantaggi chiave


- Elevato valore del pH
- Elevata radiopacità
- Consistenza cremosa
- Facile da rimuovere (materiale non indurente)
- Rilascio ionico rapido (composizione acquosa)

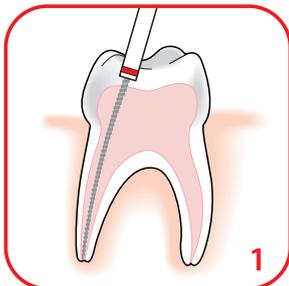

1 Preparare, pulire e asciugare meticolosamente il canale radicolare.

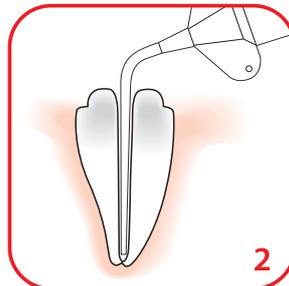

2 Riempire il canale con Opacal dalla porzione apicale della radice verso l'esterno. Utilizzare la punta inclusa e rimanere ad almeno 2 mm dall'apice.

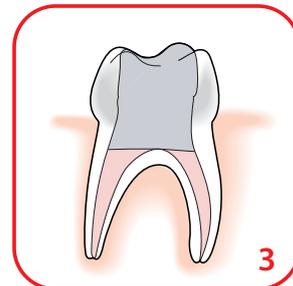

3 Riempire la cavità con un materiale di riempimento temporaneo per una sigillatura ermetica durante l'intersezione.



Opacal Calcium Hydroxide Paste	REF 11020
1 siringa da 3 ml	
10 puntali per applicazione (single use)	
1 presa per le dita	

Opacal refill	REF 11022
10 puntali per applicazione (single use)	



Produits Dentaires SA
pd-dental.com