



aghi sterili monouso in **acciaio inox**
e punta con triplice affilatura trattata
per un effetto anticooring



100 aghi dentali universali con cono filettato standard europeo,
monouso, sterili e confezionati singolarmente



Caratteristiche


- Siliconato per una maggior facilità di penetrazione con silicone autopolimerizzante che non rilascia durante l'iniezione
- Ogni singolo ago è munito di protettore e cappuccio posteriore a tenuta e uniti con punto di saldatura per assicurare il mantenimento della sterilità
- Indicazione sul cono dell'orientamento della punta
- Sterilizzati a raggi gamma per un'elevata sicurezza

Istruzioni per l'uso:

Posizionamento dell'ago sulla siringa:



1. Rompere il sigillo
2. Tirare ruotando per togliere il cappuccio
3. Innestare l'ago alla siringa avendo cura di non rimuovere il protettore
4. Rimuovere il protettore con un leggero movimento di torsione appena prima di effettuare l'anestesia

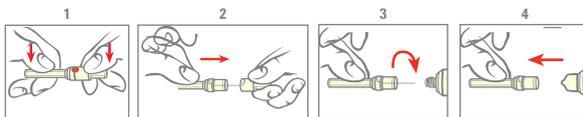

Codice	Descrizione	Diametro cannula (mm)	Lunghezza parte posteriore della cannula (mm)	Contenuto	Colore Cono	Tipo anestesia	Tipo attacco
SPV17180	27G x 36mm	0,4	11 - 13	100 pz.		Tronculare	Europeo
SPV17181	30G x 12mm	0,3	11 - 13	100 pz.		Intraligamentare	Europeo
SPV17182	30G x 21mm	0,3	11 - 13	100 pz.		Plessica	Europeo
SPV17183	30G x 25mm	0,3	11 - 13	100 pz.		Plessica	Europeo
SPV17184	30G x 16mm	0,3	11 - 13	100 pz.		Intraligamentare	Europeo

Simit Pharma è una divisione di:

Simit Dental srl

Via Carlo Pisacane 5/A
46100 Mantova
Tel. +39 0376 267811
Fax. +39 0376 381261
info@simitdental.it
www.simitdental.it



STERILE R

CE 0426

