

Punte di carta sterili

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Le punte di carta sono spicole bianche e hanno una tenacia definita. Possono facilmente penetrare nei canali stretti e curvi.
2. Assorbono efficacemente la saliva asciugando i tessuti canalari rapidamente.
3. Rimangono dritte anche quando immerse in una soluzione antimicrobica o disinfettante durante il trattamento endodontico.
4. I diametri sono conformi agli strumenti canalari.
5. STERILI: vengono trattate con raggi gamma da 25kGy dopo il confezionamento.

Solo per uso dentale.

Scegliere la stessa misura dei file e usare le pinzette per applicare le punte di carta nel canale radicolari. Per uso singolo.

COMPOSIZIONE

Carta

1) MODALITA' DI UTILIZZO

Le punte di carta vengono utilizzate per assorbire i liquidi del tessuto canalare durante il trattamento endodontico.

2) CONTROINDICAZIONI

Nessuna controindicazione conosciuta.

3) SPECIFICHE

Punte di carta Zarc misura 0.04 e 0.06				
Descrizione standard	.04/25	.04/30	.06/25	.06/30
Lunghezza (mm)	28	28	28	28
Diametro in punta (mm)	0.25	0.30	0.25	0.30



Punte di carta Zarc misure speciali

Nome	X-Fine	Fine
Lunghezza (mm)	28	28
Diametro in punta (mm)	0.14	0.17

Punte di carta BlueShaper® misure

Nome	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7
Lunghezza (mm)	28	28	28	28	28
Diametro in punta (mm)	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50

Punte di carta Excalibur® misure

Nome	E20	E25	E35	E45
Lunghezza (mm)	28	28	28	28
Diametro in punta (mm)	0.20	0.25	0.35	0.45

Punte di carta SlimShaper® misure

Nome	ZS1	ZS2	ZS3
Lunghezza (mm)	28	28	28
Diametro in punta (mm)	0.15	0.20	0.25

Punte di carta ApicalShaper® misure

Nome	Z30	Z35	Z40	Z50
Lunghezza (mm)	28	28	28	28
Diametro in punta (mm)	30	35	40	45

5) CONSERVAZIONE E SCADENZA

- Conservare al di sotto di 40°C, in un luogo non ventoso e non corrosivo. L'altezza massima di accumulo è 5 scatole.
- La durata di conservazione delle punte di carta è 3 anni.

6) CONFEZIONAMENTO

- Confezione: 180 pezzi/scatola. Sulla scatola sono visibili l'etichetta e la firma con prova di conformità.

7) NOTE AGGIUNTIVE

- Smettere di utilizzare le punte di carta quando il colore è cambiato (il colore normale è bianco).
- Se la confezione è rotta, non utilizzare il contenuto.
- Solo per uso singolo.
- Si prega di utilizzare il prodotto in tempo dopo l'apertura della confezione.

8) STERILIZZAZIONE

- Conservare secondo le indicazioni, 3 anni di validità della sterilizzazione.

 Shanghai Xing Yu Medical Equipment Co., Ltd
3 Floor, Building 21, No. 3825 Xin Zhuan Road,
Dong Jing Town, Shanghai. CHINA
hola@zarc4endo.com • www.zarc4endo.com

 Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1
47877 Willich, Germany



Importer for the EU:
IPG Dental Group S.L.
C. Marqués de San Esteban Nº 8, A y B
33206 Gijón, Asturias (Spain)